



DialoQ® – Mobilassistent handbok

Svenska version 2.0

Om programvara

DialoQ Mobile är ett tal styrd mobil assistent för Android-enheter. Applikationen har utformats för användare med fysiska funktionshinder som förhindrar användning av pekskärmstelefon.

Med DialoQ kan användarna använda alla grundläggande funktioner som finns tillgängliga på sina mobiltelefoner, inklusive röst- och videosamtal och korta meddelanden genom talkommandon.

DialoQ Mobile är en talaroberoende lösning: det kan känna igen en mängd olika talare utan behov av utbildning.

Speciella tillgänglighetsfunktioner inkluderar enklare samtalshantering i helskärm, automatisk högtalartelefon, talstyrd dialogruta och uppvakningsordet (Wake-Up-Word), vilket gör det möjligt för en att använda programvaran genom att bara använda tal.


Med DialoQ Mobile är det också möjligt att styra omgivningskontroll som HouseMate eller Pretorian Environ.

1. Installation


Ladda ner appen till din mobil, till exempel genom att öppna nedladdningslänken som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren.

När appen har laddats ner startar du Android-installationsprogrammet och installerar programvaran på din mobil.


1. Leta reda på apk-filen från telefonminnet, till exempel om du har kopierat det med kabel till temp-mappen. Öppna "Mina filer"

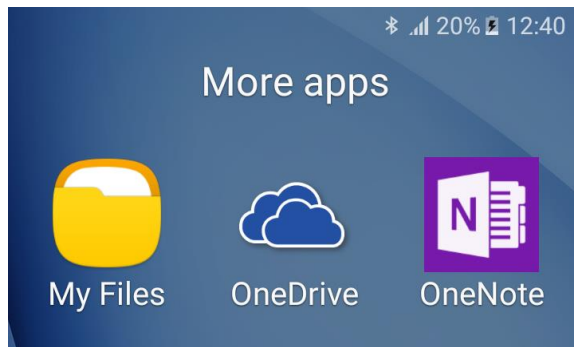


2. Välj rätt mapp:

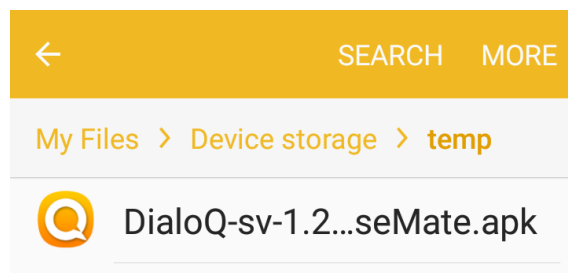

3. Starta appen och aktivera 'installera okända appar' för den här programvaran om installationen frågar om den.
4. Observera att appen kräver många behörigheter att fungera
 - a) behörigheter för 1.2x version:

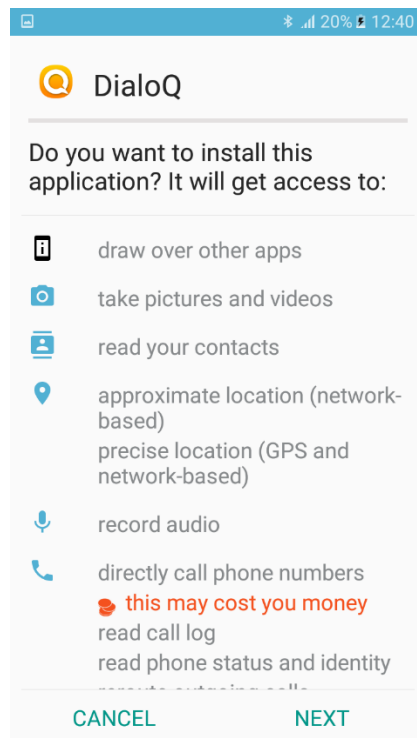


b) för 2.x version, klicka och acceptera alla:

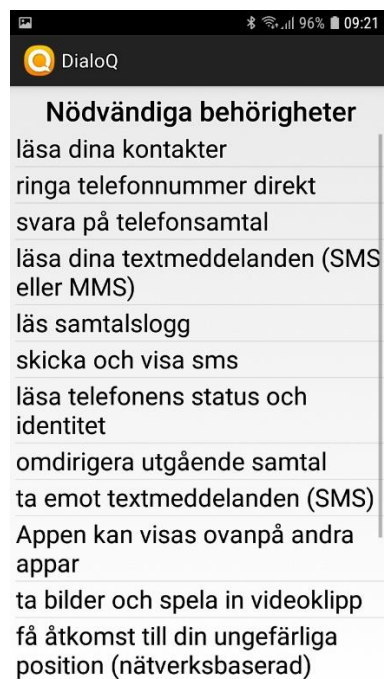


5. När du har accepterat behörigheter är appen installerad

Innan du startar DialoQ, se till att du har "Text-till-tal" aktiverad. Här är guiden hur du installerar Google 'Text-till-tal' för din mobil:


Öppna inställningar och "språk och inmatning" - "text-till-tal":

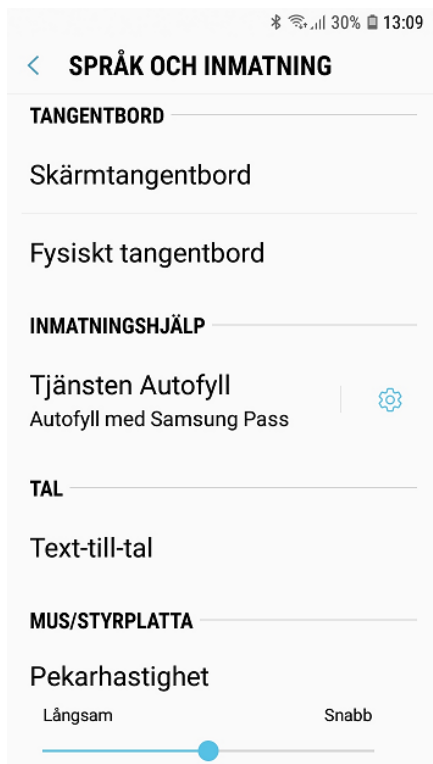


1. Öppna inställningarna för Google Text-till-tal genom att klicka på ikonen:

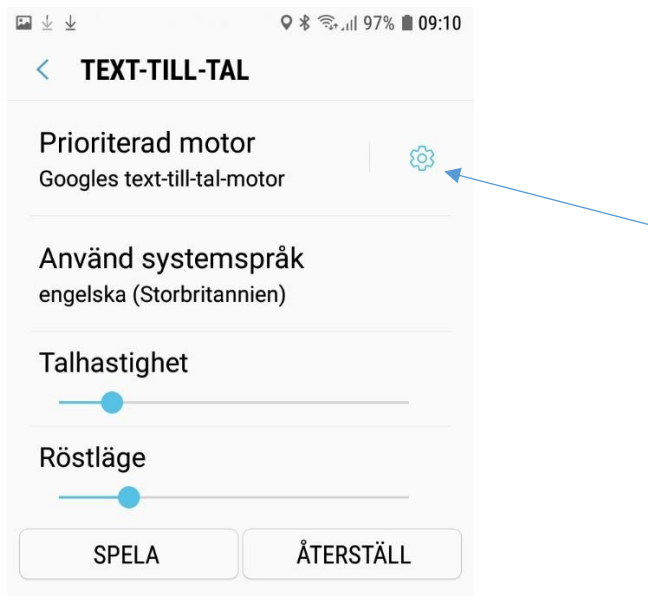

2. Ange rätt språk genom att öppna språklista (hitta "svenska")
3. Installera röstdata, observera att när data har laddad ned finns det en skräpikon bredvid texten.

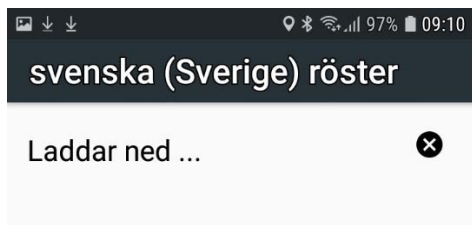

När data har laddad ner:

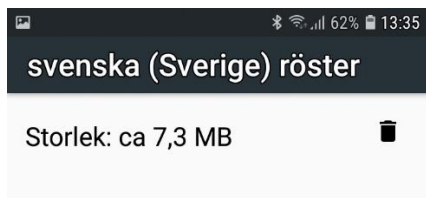


4. Kontrollera andra Text-Till-Tal-inställningar. Till exempel:
- Använd endast Wi-Fi (av)
 - Höj talvolumen (på)
 - Anonyma användningsrapporter (av)

1.1 Licensaktivering


Starta nu DialoQ-programmet genom att välja ikonen från mobil. Det finns också hemversion tillgänglig för DialoQ. Detta innebär att mobilen startar direkt till DialoQ och DialoQ kommer att vara det huvudsakliga användargränssnittet för mobilanvändning..

Hemversionen kan aktiveras / avaktiveras från inställningsskärmen och efter installationen kan väljas genom att trycka på hemknappen. Om du behöver hemversion av DialoQ, fråga från återförsäljare.

Efter att du har startat DialoQ måste du aktivera licensen. Återförsäljare har gett dig licensnyckeln som du behöver ge:

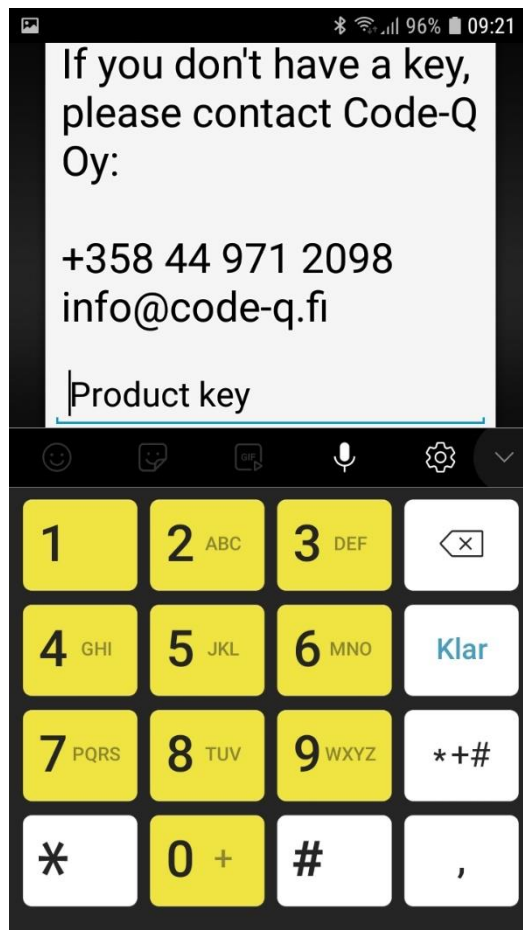

Aktivering behöver internetanslutning så att antingen WiFi eller mobil dataanslutning måste vara aktiv.

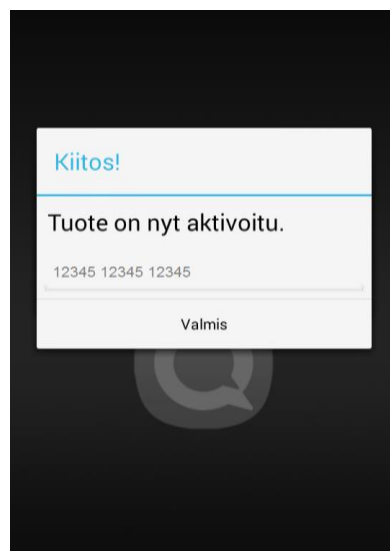

Om aktiveringen misslyckas, kontrollera licensnyckeln och internetanslutningen. Om problemet fortfarande visas kontakt tillverkare eller återförsäljare (se kontaktinformationen i slutet av manual).

2. Använda programvaran

När programvaran är aktiverad startar DialoQ-programmet.

Huvudskärmen och standardläget:



Dialog och användning historia:

Visar dialogrutan med programvaran och senaste erkännandesresultat.

Röstindikator:


Visar röstaktiviteten som är erkänd av mikrofonen. Om indikatorns mitt är grönt aktiveras uppvaksordet och programvara lyssnar på uppvaksordet "Lyssna". Kommandon lyssningsläge kan aktiveras antingen med uppvaksord eller genom att trycka på röstindikatorns mittpunkt.

Inställningar

Inställningar kan nås med hjälp av rullgardinsmenyn.

Exempelkommandon:

Exempelkommandon kan visas för att påminna användaren hur man kan använda app.

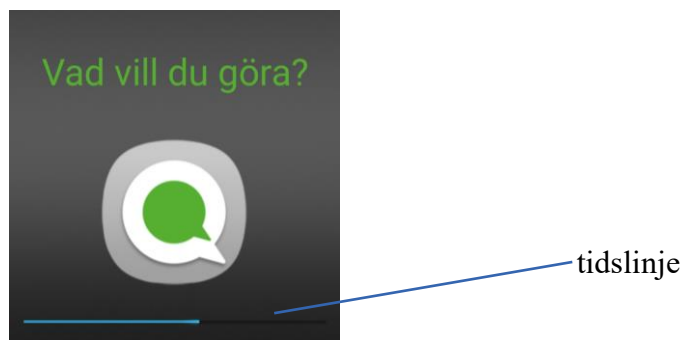

Tidslinjen visar till den tid som användaren har för att ge kommandot, när tiden är över – appen återgår till att lyssna på uppvakningsordet

2.1 Uppvakningsordet

Med uppvakningsord är det möjligt att använda DialoQ och styra enheten utan att röra vid skärmen.

I svenska väcknings ordet är **‘Lyssna’**

När uppvakningsordet är erkänt ändras appen till tal kommandot lyssningsläge.

Exempel:


Starta appen och se till att det inte finns bakgrundsbrus. Säg ordet "Lyssna".

NOTERA!

När du startar app första gången gör du så här:

- tryck på Q-knappen och säg "datum"
- gör det 3-5 gånger
- försök nu utan att trycka Q-knappen och säg "lyssna"

När appen erkänner uppvakningsordet hörs en pip och tal kommandot lyssningsläge startar.

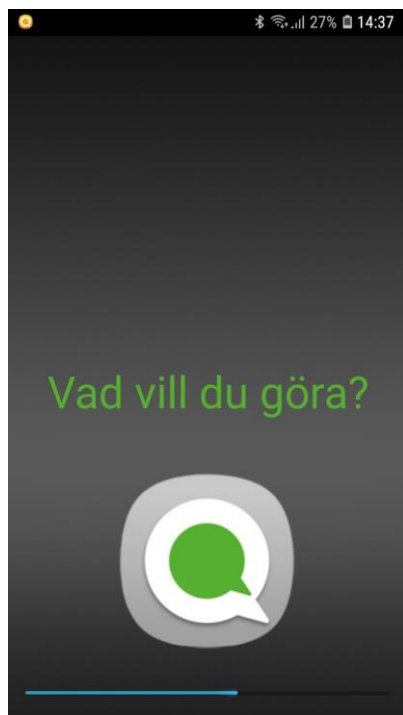

Lyssningsläge

Du kan nu ge kommandon, till exempel att avbryta genom att säga 'avbryt'. Observera att du måste ge talkommandon inuti tidsramen som anges av tidslinjen.

Om uppvakninsordet erkänns inte, försök igen i tyst miljö. Om du fortfarande misslyckas, gå till inställningar och försök med att ställa in "lättat nyckelord igenkänning" - på

DialoQ stöder automatisk mikrofon anpassning. Därför görs inte första erkännanden genom att använda optimala mikrofoninställningar. Innan du ändrar identifieringsparametrarna från programinställningarna, försök med standardinställningar från 5 till 10 gånger.

2.2 Telefon/samtal

Med talkommandot "Ring <namn>" kan användaren ringa ett telefonsamtal. Efter kommandot "ring" förväntas antingen förnamn eller för- och efternamn.

Om du bara ger förnamn och du har mer än en match tillgänglig i telefonboken med samma förnamn, kommer ansökan att föreslå vilken som ska ringas.

Exempel:

Användaren säger "ring Stefan". DialoQ svarar ringen "Stefan Holm eller Stefan Johansson?". Appen väntar nu på att säga hela namnet eller 'avbryt'.

Namnen skapas när appen startar baserat på kontaktinformation som finns på telefonens kontaktlista.

Kom ihåg att användandet av specialtecken eller korta termer som "Mrs." eller "Dr." rekommenderas inte för taligenkänning.

När appen startar läser det telefonlistans kontaktlista och skapar det nödvändiga vokabuläret för taligenkänning.

Du kan kontrollera det skapade vokabuläret för taligenkänning från inställningarna "Svara automatiskt". Detta öppnar en lista som innehåller alla tillgängliga objekt för taligenkänning.

Taligenkännerens ordförråd kan avvisa några av telefonbokskontakterna, om de innehåller specialtecken. Om du hittar en saknad kontakt, ändra den personens information från telefonens kontaktlista.



'Ring Pirjo M'

Exempel "Ring Stefan":

Starta appen och se till att miljön är tyst. Säg "*Lyssna*". När appen erkänner uppvakningsordet hörs en pip och tal kommandot lyssningsläge startar.

Nu säger röstkommandot "*Ring Stefan*" (exemplet förväntar att telefonens kontaktlista har namnet "Stefan", alternativt kan du använda ett annat namn från din kontaktlista).

Om appen erkänner röstkommandot kommer det att visas kommandot "*Ring*" och matchande namn "*Stefan*". Säg "*Ja*" om du vill ringa eller alternativt "*Nej*" eller "*Avbryt*" om du vill avbryta samtalet.

2.2.1 Samtal till ett telefonnummer

Samtal till telefonnumret görs med röstkommandot "*Ring nummer <nummer>*". Exempel: "*Ring nummer +358 50 123 4567*".

Observera att kommandot stöder områdeskoden och behöver prefix som +. Du kan också ha ytterligare ord i kommando som "ring till nummer <nummer>"

Exempel:

Säg kommandot "Ring till nummer plus tre fem åtta ...".

2.3 Avsluta ett samtal

Användaren kan avsluta samtalet på flera sätt. Använda pekskärmen (röd fullskärm), närhetssensor, med en kontakt eller med tal kommando.

2.3.1 Avsluta samtal med pekskärmen

Samtalet kan avslutas med hjälp av skärmen genom att trycka på det röda området - hela skärmen fungerar som en stor knapp.



Pågående samtal

Den här funktionen är aktiverad som standard.

2.3.2 Avsluta samtal med närhetssensor

Samtalet kan avslutas med hjälp av närhetssensor. Du måste ställa in första "avsluta samtal med närhetssensor" - inställning på från appinställningar - samtalsinställningar.

När funktionen är påslagen kan du avsluta samtalet genom att täcka mobilskärmen (övre delen av den) i 2 sekunder.

När app märker att skärmen är täckt visas nedräkningen i 2 sekunder för att avsluta samtalet.

Observera att om inställningen är på, avslutas samtalet om mobilen används på normalt sätt (på örat).

Your device must support proximity sensor to be able to use this feature.

2.3.3 Avsluta samtal med röst

Användaren kan också avsluta samtalet med hjälp av röstkommandon.

Att avsluta det inkommande samtalet görs genom att använda kommandot: "Avvisa", appen kommer att vägleda dig för det här kommandot när telefonen ringer. Observera att du måste säga kommando under tyst tid, så vänta tills applikationen är klar att "tala".

Att avsluta det pågående samtalet görs med hjälp av röstkommandot: "Avsluta samtal". Observera att du måste ställa in den här funktionen från programinställningarna innan den tas i bruk.

Observera att du måste ställa in den här funktionen från programinställningarna innan den tas i bruk.

Observera att "avsluta samtal" - kommandot är väldigt känsligt, så det är inte tillgängligt för alla telefoner. Vänligen se listan över modeller som stöds i slutet av den här användarhandboken.

2.4 Acceptera samtalen

Användaren kan acceptera inkommande samtal på flera sätt. Använda pekskärmen (grön fullskärm), närhetssensor, med en kontakt (trödlös some Bluetooth eller trådbundet) eller med tal kommando.

2.4.1 Acceptera samtalet med röst

Användaren kan acceptera inkommande samtal genom att använda röstkommandot: "Svara".

Accepting the incoming call is done by using command: "Svara", program kommer att guida dig för detta kommando när telefonen ringer.

Observera att du måste ha "Svara med röstkommandot" - funktionen inställd från samtalsinställningar innan du kan acceptera inkommande samtal med röst.

2.4.2 Acceptera samtalet med pekskärmen

Du kan acceptera inkommande samtal med hjälp av pekskärm. När telefonen ringer och skärmen ändras till grön - tryck på skärmen för att acceptera samtalet. Hela skärmen fungerar som en stor samtalsknappen.



Inkommande samtal

2.4.3 Acceptera samtalet med närhetssensor

Användaren kan acceptera inkommande samtal med hjälp av närhetssensorn. Du måste ställa in "Svara med närhetssensor" - inställning på från samtalsinställningar.

När funktionen är påslagen kan du acceptera samtalet genom att täcka mobilskärmen (övre delen av den) i 2 sekunder.

Observera att om inställningen är på accepteras samtalet om mobilen används på normalt sätt (på örat).

2.5 Automatisk svarfunktion

Om användaren har problem med tal kan de använda automatisk svarfunktion.

Funktionen kan användas för att kontrollera till exempel att allt är okej om DialoQ-användare kan inte svara på telefonen. Som standard är den här funktionen avstängd.

Så här kan du aktivera autosvaret::

- Öppna programinställningar och samtalsinställningar
- Öppna "Svara automatiskt"
- Välj person (er) från listan som du vill att mobil svarar automatiskt och acceptera sedan valet med "ok"
- Välj önskat "Automatiskt svar fördröjning"

Exempel: Automatisk svar på ett samtal från "Morsan"

- Öppna programinställningar och samtalsinställningar
- Öppna "Svara automatiskt"
- Hitta "Morsan" från listan och acceptera listan med "ok".
- Fråga nu "Morsan" att ringa till ditt nummer
- När 10 sekunder är slutförd kommer samtalet att svaras automatiskt.

Observera att även om autosvar är inställt kan användaren fortfarande avvisa samtalet när mobil ringer - men endast om fördröjning för autosvar är inställt. Utan dröjsmål samtal svaras direct.

Om du har ställt in funktionen för automatisk svar svaras både vanliga samtal och videosamtal automatiskt! Det är förstås – bara om enheten stöder videosamtal.

2.6 Textmeddelanden

Med DialoQ är det möjligt att skicka text meddelanden med röstkommandon. Diktationen använder onlinetjänst och kräver internetuppkoppling, men det är också möjligt att använda DialoQ recognizer för att skicka meddelandemallar utan internetuppkoppling.

För personer med begränsad talfunktion är det möjligt att inaktivera alla textmeddelande kommandon.

2.6.1 Skicka dikterat textmeddelande

Du kan hitta den fullständiga listan över stödda talkommandon för sms-sändning i slutet av den här guiden.

- **Exempel på diktat och sändande meddelande till 'Mamma':**
- "Lyssna"
- säg kommandot för att skicka SMS till exempel "Skicka meddelandet till Mamma"
- app informerar "diktera meddelandet till mamma"
- efter pip kan du starta diktering
- dictera 'Hejssan hur mår du'
- diktationen avslutas automatiskt när det inte finns något inkommande tal
- Appen verifierar resultatet och frågar om du vill skicka meddelandet. Svara 'Ja' för att skicka meddelandet eller 'Nej' (eller 'avbryt') för att avbryta sändningen
- om du svarar 'Nej', frågar programmet om du vill fortsätta diktatering för ett längre meddelande. Svara 'Ja' för att fortsätta diktatering för längre meddelande.

Diktering kräver internetuppkoppling.

2.6.2 Skicka textmeddelande utan internetanslutning

Du kan skicka textmeddelanden med röstkommandon utan internetanslutning genom att använda de fördefinierade meddelandemallarna.

Om du vill ändra och lägga till nya meddelandemallar:

- Öppna programinställningar
- Välj Meddelandeinställningar och Meddelande mallar
- Välj 'Ny...' eller välj mall för att ändra
- Om du har valt 'Ny...' skriver du mallen och trycker på 'Ok'

Meddelandemallarna stöder också dynamiska fält, så du behöver inte skriva flera meddelandemallar, till exempel för att berätta att du kör några minuter sent.

The dynamic fields are defined by adding {number} och {time} makron till meddelandemall.
Exempel:

Jag är **{number}** minuter sen.

Nu när mallen används kan användaren säga "Jag är fem minuter sen" eller för ett annat meddelande "Jag är tjugo minuter sen" med samma meddelandemall.

- {number} kan vara allt mellan 0-100
- {time} kan vara tid i 5 minuters noggrannhet (24h klocka) till exempel: 14:35

Exempel på hur du skickar meddelandet till 'Morsan' utan internetuppkoppling (med hjälp av mallarna):

- Säg 'Välj meddelande Morsan'
- Meddelandemallarna visas
- säg nu meddelandemallen, om du använder den med ett dynamiskt fält, säg mallen och numret till exempelpel: 'Jag är tio minuter sen'
- om du vill avbryta sändningen säg bara 'avbryt'

2.6.3 Skicka textmeddelande med standardinmatningsmetod

Det är möjligt att använda alternativ metod för sändning av kortmeddelanden, genom att använda standardmeddelandeprogram och textinmatningsmetod. Observera att det här kommer att kräva att du använder händer.

Funktionen är implementerad för personer som kan använda sina händer och föredrar att använda t.ex. En särskild inmatningsmetod för textinmatning.

Talkommandon kan sedan användas för att öppna kortmeddelandeprogrammet och fylla mottagarinformationen med tal.

Så här kan du använda standardinmatning med textmeddelande:

- Öppna programinställningar
- Öppna Meddelandeinställningar och SMS skrivläge
- Välj 'Skriv meddelande'

Nu kan du använda röstkommandot "meddelande <mottagare>" för att öppna textmeddelandi med standardinmatningsmetod (till exempel: "meddelande Mor").

2.6.4 Skicka textmeddelande med flera olika metoder

Om användaren vill använda olika metoder för att skicka textmeddelanden, som exempel: vanligtvis vill han använda diktering men när Wi-Fi inte är tillgängligt föredrar han att använda meddelandemallar.

Detta kan göras genom att använda olika röstkommandon:

- Öppna programinställningar
- Öppna Meddelandeinställningar och kolla på SMS skrivläge
- röstkommandot "meddelande till Morsan" kommer att fungera olika sätt beroende på sms-skrivläge, om läget är:
 - o Diktera meddelandet, öppnar diktation
 - o Skriv meddelande, öppnar standardinmatningsmetoden och meddelandeprogrammet
 - o Välj meddelande, öppnar meddelandemallarna
- Observera att oavsett vilket skrivläge du använder kan du fortfarande använda kommandon
 - o 'Diktera meddelande till <namn>' – för diktering
 - o 'Välj meddelande till <namn>' – för att välja en meddelandemall

2.6.5 Så här läser du och bläddrar i textmeddelanden

DialoQ läser också högt inkomna SMS-information (avsändarens namn om det är känt) om inställningen "Tala ut inkommande SMS-info" är aktiverad.

När ett textmeddelande är mottaget kan användaren använda kommandot 'läs meddelande' för att läsa upp meddelandet. När ett kort meddelande är mottaget kan användaren använda kommandot 'läs meddelande' för att läsa upp meddelandet.

Den bläddring av meddelanden görs av kommandon 'nästa meddelande' eller 'förra meddelande' eller 'föregående meddelande'.

2.6.6 Hur man svarar på ett textmeddelande

Du kan svara på mottaget SMS med röstkommandonens svar på meddelande. Dessa kommandon svarar automatiskt på det senaste mottagna meddelandet.

Du kan också använda samma svarkommandon medan du bläddrar på meddelandena genom att använda kommandon "nästa / förra meddelande"

Att ge kommandot "svara meddelande" svarar på det aktiva meddelandet som användaren har bläddrat för.

Exempel:

- mobil tar emot ett meddelande från mamma, DialoQ säger 'Meddelande från Mamma'
- användare: 'läs meddelande'
- DialoQ läser meddelandet högt.
- användare: 'nästa meddelande'
- DialoQ: 'meddelande två av <xx>, avsändare Tapio'. (<xx> är här antalet)
- om användaren nu säger "svara på meddelande" kommer meddelandet att skickas till avsändaren av det aktuella meddelandet (Tapio)

2.7 Videosamtal

DialoQ innehåller talkommando för videosamtal, det är "video samtals kontakt>".

Observera att inte alla telefoner stöder videosamtal, så både telefonens och mottagarens telefon behöver stödja videosamtal via mobilnät (Samsung Android-telefoner stöder vanligtvis dem).

Observera att videosamtal använder en annan metod för röstinspelning, så det går inte att hänga videosamtalet med hjälp av talkommandon.

Om du har ställt in autosvarfunktionen för vissa användare – automatiskt svaret kommer också att fungera med videosamtal

2.8 Andra talkommandon

Det finns många andra talkommandon som stöds av programmet, i slutet av dokumentet hittar du olika kommandon listade.

Här är en kort förklaring om olika funktioner.

2.8.1 Rensa användarhistoriken

Användarhistoriken kan tömmas från skärmen med talkommando 'rensa skärm'.

2.8.2 Aktuell tid

Användaren kan fråga aktuell tid med talkommando "klockan". Tiden kommer att talas till användaren och det ingår inte i användarhistoriken.

2.8.3 Aktuell datum

Med kommandot "datum" kommer programmet att berätta aktuell dag och datum. Datumet kommer att talas till användaren och det ingår inte i användarhistoriken.

2.8.4 Ringa tillbaka till nummer

Using the command 'ring åter' user can call to the latest non answered phone number. This command is useful when non answered phone number is not in the contact information.

2.8.5 Återuppringning

Med kommandot "ring åter" -användaren kan ringa till det senaste svarade telefonnumret. Det här kommandot är användbart när det 'ej svarade'-telefonnumret inte finns i kontaktinformationen.

2.8.6 Få information om samtal

Med kommandot "Nästa samtal" och "Förra samtal" kan användaren fråga information om samtal. Användaren kan också använda "samtal <nummer>" för att bläddra i samtalshistorik.

2.8.7 Ställa tyst läge på och av

Med kommandot "ljud av" och "ljud på" kan användaren slå på och stänga av det tyst läget.

Kommandot kommer att aktivera / avaktivera alarmlarm, till exempel inkommande samtal och ringsignal. Detta matchar det tysta läget som är tillgängligt på Android OS-rullgardinsmenyn.

3. Andra funktioner


Andra DialoQ-funktioner som gör telefonanvändningen enklare.

3.1 Manöverkontakt stöd

DialoQ stöder följande manöverkontakter:

- med headsetkontakt och adapter (from Kajo Apuvälineet – note not supported on Android 9.0 or newer)
- med USB OTG kabeladapter
- Bluetooth kontakter som Blue2 or Pretorian Applicator

Exempel på en inställning med headsetkontakt:

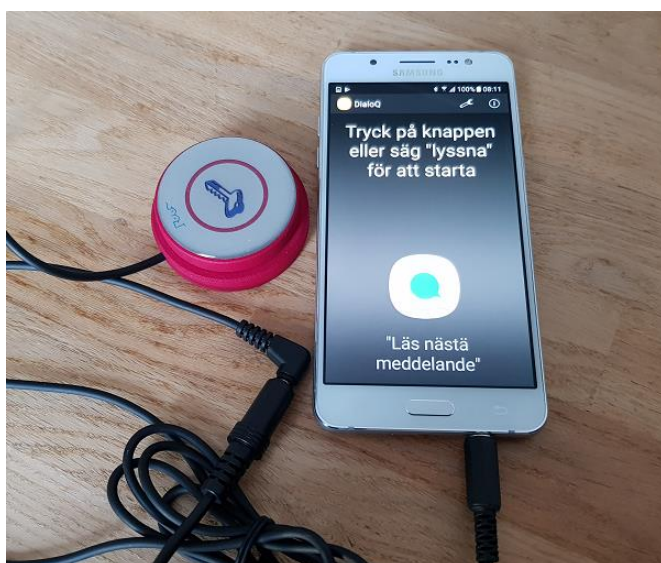

Det är möjligt att använda följande funktioner med kontakter:

- samtals (direkt (serviceanrop) eller från listan)
- omgivningskontroll
- alarm
- datum och tid
- väder

En kontakt är tillräcklig för att använda alla ovanstående funktioner men det är möjligt att använda flera kontakter till exempel en funktion per en kontakt.

3.2 Energisparfunktion

DialoQ-programmet använder inbyggd energisparfunktion som stänger skärmen när programmet inte används för ett tag.

Användaren kan aktivera skärmen på:

- säger "Lyssna"
- trycka på hemknappen (mittenknappen på Android-telefoner)
- tryck på den externa manöverkontakten

3.3 Högtalartelefon-läge

DialoQ fungerar automatiskt som högtalartelefon.

Du kan också stänga av högtalartelefonfunktionen från programinställningarna. Du kan också använda det automatiska högtalartelefonläget, som stänger av högtalarläge när telefonen lyftes till örat.

3.4 Använda DialoQ med headset

DialoQ stöder trådbundna och trådlösa headset. Båda kommer att kräva användning av händer för att trycka till exempel på samtalsknappen. Som standard föredras högtalarläge.

3.5 Hur man stänger appen

Du kan stänga appen genom att trycka på enhetens bakåtknapp.

Mobile kommer att fråga från användaren om han är säker på att stänga programmet. Om användaren svarar "Ja" stänger programvaran.

Om användaren trycker på oavbruten hemknappen, är DialoQ inte stängd, men efter att skärmen stängts av visas DialoQ igen som huvudprogram.

Det finns också hemversion tillgänglig för DialoQ. Detta innebär att mobilen kommer att starta med DialoQ och DialoQ kommer att vara det huvudsakliga användargränssnittet för mobilanvändning.

3.6 Visa exempelkommandon

DialoQ visar exempelkommandon (tips) på skärmen. Det här är användbart för personer som inte använder programmet så ofta eller har något annat problem med minne.

Det är möjligt att inaktivera inställning från programinställningar ("Visa exempelkommandon").

3.7 Alltid på top - funktionen

DialoQ försöker alltid vara den högsta applikationen, så även om användar- eller vårdpersonal oavsiktligt har tryckt på hemknappen eller på annat sätt lyckats få DialoQ-icke-aktiv, kommer DialoQ att dyka upp som på top applikationen.

3.8 Stöd för flera olika talare

DialoQ innehåller avancerade inställningar för att ändra taligenkänningen för att fungera med flera olika talare.


Du kan till exempel:

- Ändra talarens rösthöjd för att känna igen för att matcha även unga barns röst

- Ändra konfidensnivå för taligenkänning och möjliggöra lättare erkännande för dem som har problem med att tala
- Sätt på känsligare inspelningsläge, till exempel för personer med svag röst som
 - o personer med andningshjälpmedel
 - o personer med ALS
 - o ...


4. Inställningar

Inställningar kan nås med hjälp av rullgardinsmenyn.

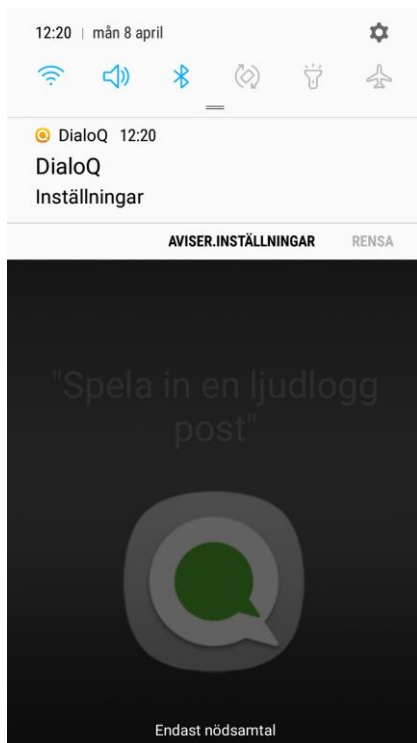


För att gå till installationsläget måste du ange lösenordet '1234'.


Du kan ändra till exempel vilka talkommandon som används, känslighet för taligenkänningar, lägga till omgivningskontroll kommandon och så vidare.

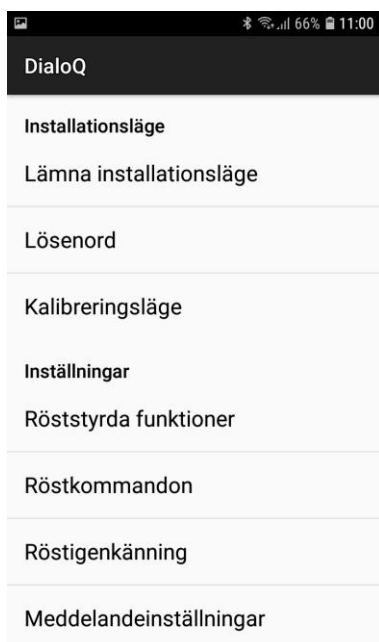

Under omgivningskontroll kan du ställa in talkommandon för kontroll av dina hushållsapparater

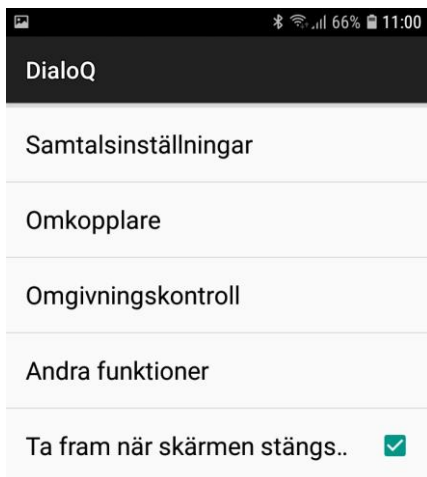

Debugläge kan användas för att skicka fellogg till tillverkaren eller för att ta reda på känslighetsinställningar för taligenkänning

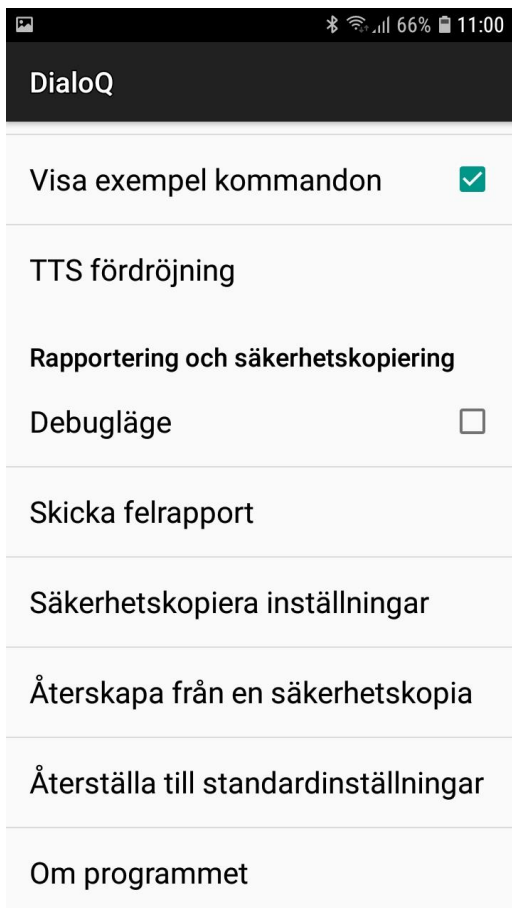

5. DialoQ mobile talkommandon (v2.0)

Samtal, videosamtal och meddelande:

Kommando	Exempel	Information
Ring <namn> Ring till <namn>	"Ring Anna" "Ring Anna Svensson" "Ring till Anna"	Samtal till en person i kontaktlista
Ring nummer <nummer> Ring till nummer <nummer>	"Ring nummer +46 12345678"	Samtal till ett nummer
Videosamtal <namn> Videosamtal till <namn>	"Videosamtal Ove" "Videosamtal Ove Sundberg"	Videosamtal till en person i kontaktlista
Videosamtal <nummer> Videosamtal till <nummer>	"Videosamtal nummer 045 123 4567"	Videosamtal till ett nummer
Ring upp Ring åter	"Ring upp"	Ring tillbaka till den som ringde
Ring igen	"Ring igen"	Ring igen till sist nummer
Vem som ringde	"Vem som ringde"	Applikation berättar senast missade samtal
SMS <namn> meddelande <namn>	"SMS Fredde" "SMS Fredde Schiller"	Skicka SMS med vald metod (standard SMS metod)
SMS till nummer <nummer> meddelande till nummer <nummer>	"SMS till nummer 46 123 4567"	-"
skicka SMS <namn> skicka meddelande <namn> skicka SMS till <namn>	"skicka SMS till Fredde"	-"
skicka SMS till nummer <nummer> skicka meddelande till nummer <nummer>	"skicka SMS till nummer 46 123 4567"	-"
diktera SMS <namn> diktera meddelande <namn> diktera SMS till <namn> diktera meddelande till <namn>	"diktera SMS till Fredde"	Diktera SMS till en kontakt
diktera SMS till nummer <nummer>	"diktera SMS till nummer 46 123 4567"	-"
välj SMS <namn> välj meddelande <namn> välj SMS till <namn>	"välj SMS Fredde"	Skicka SMS med fördefinierad SMS mall
välj SMS till nummer <nummer>	"välj SMS till nummer 46 123 4567"	-"
läs SMS läs meddelande	"läs meddelande"	27xamp upp senaste eller aktiv meddelande
läs nästa meddelande läs nästa SMS	"läs nästa meddelande"	läser upp nästa meddelande
läs föregående meddelande läs föregående SMS	"läs föregående SMS"	läser upp föregående meddelande
nästa meddelande nästa SMS	"nästa SMS"	visar nästa SMS
föregående meddelande föregående SMS	"föregående SMS"	visar föregående SMS
svara på meddelandet svara på SMS	"svara på SMS"	svarar på senaste eller på aktiv meddelande

Svara eller avvisa på ett inkommande samtal:

Kommando	Exempel	Information
svara	"Svara"	Svarar på ett inkommande samtal
avvisa	"Avvisa"	Avvisar ett inkommande samtal

<namn> kan vara:

	Exempel
<förnamn>	"Ring Ove" "Ring Fredde"
<förnamn><efternamn>	"Ring Ove Sundberg"

Om du har många person med samma förnamn DialoQ frågar vem som du vill ringa till.

Bekräftelse kommandon:

Kommando	
"Ja"	Svara 'ja' om du vill köra kommandot. Till exempel DialoQ frågar 'Ring Fredde?' – Du svarar 'Ja'
"Nej"	Svara 'nej' om du vill inte köra kommandot. Till exempel om mottagare kunde inte erkändes eller diktering var fel.
"Avbryt"	Svara 'avbryt' om du vill avbryta kommandot.

samtalstid kommandon:

Kommando	Information
"Avsluta samtalet"	Under samtalet, om användaren vill avsluta samtalet – säg: 'Avsluta samtalet'

Andra kommandon:

Kommando	Exempel	Information
Rensa skärm	"Rensa skärm"	rensar historik från skärm
Ljud av	"Ljud av"	ställa enheten i tyst läge
Ljud på	"Ljud på"	ställa enheten ljud på
Vad är klockan	"Vad är klockan"	berättar aktuell tid.
Klockan	"Klockan"	–"
Datum	"Datum"	berättar aktuell datum
mobil data på	"mobil data på"	ställa mobil data på
mobil data av	"mobil data av"	ställa mobil data av
hur är vädret väder	"hur är vädret"	berättar information om väder just nu (i aktuella position (GPS))
vad är väder vädret	"vad är väder"	–"
hur är vädret väder idag	"hur är vädret idag"	berättar information om väder idag (i aktuella position (GPS))
vad är vädret vädret idag		
hur är vädret väder i morgon	"hur är vädret i morgon"	berättar information om väder idag (i aktuella position (GPS))
vad är vädret vädret i morgon		
vad är väder vädret <plats>	"vad är vädret i Helsingfors"	berättar information om väder just nu i plats (från 'favourite locations anställning)
hur är väder vädret <plats>		
vad är väder vädret <plats> idag	"vad är vädret i Helsingfors idag"	berättar information om väder idag i plats (från 'favourite locations anställning)
hur är väder vädret <plats> idag		
vad är väder vädret <plats> i morgon	"vad är vädret i Helsingfors i morgon"	berättar information om väder i

hur är väder vädret <plats> i morgon		morgon I plats (från 'favourite locations anställning)
enhetens status	"enhetens status"	berättar information om mobil till example batteri, signalstyrka. GPS...
batteri status	"batteri status"	berättar information om batteri status
position plats	"position"	berättar information om aktuella position (address och exakthet)
ställ alarm <till>	"ställ alarm 11:30"	ställ alarm
alarm status	"alarm status"	berättar information om alarm
ta bort alarm	"ta bort alarm"	raderar alarm
stänga/bort/sluta/avsluta	"stänga"	avslutar alarm som ringer

RSS-nyhetsläsare:

Kommando	Information
"Nyheter"	Öppnar RSS nyhetskällor
"Läs nyhet"	Läser aktiv (index) nyhet
"Nyhet <nummer>"	Ändrar aktiv nyhet index till angivet index nummer
"Nästa nyhet"	Ändrar aktiv nyhet index till nästa nyhet
"Föregående nyhet"	Ändrar aktiv nyhet index till förra nyhet
"Förra nyhet"	
"Läs nästa nyhet"	Läser nästa / förra nyhet eller nyheter på angiven index
"Läs föregående nyhet"	
"Läs förra nyhet"	
"Läs nyhet <nummer>"	

Webbläsare:

Kommando	Information
"Öppna webbsida <sida>"	Öppnar webbsidan exempel: "Öppna webbsida Aftonbladet"
"Öppna webbplatsen <sida>"	
"Skrolla"	Skrollas ner
"Skrolla ner"	
"Skrolla upp"	Skrollas upp
"Till början"	Skrollas up till början av sida
"Till slutet"	Skrollas till slutet av sida
"Välj"	Startar välj / klick selektion metod
"Snabb välj"	Snabb klick med medel punkt I selektion metod
"Gå tillbaka"	Gå tillbaka till föregående sida
"Gå vidare"	Gå vidare till nästa sida
"Stäng webbläsare"	Stänger webbläsaren
"Stäng webbplatsen"	

Röstmemo:

Kommando	Information
"Diktera [en] röstmemo"	Spara nytt röstmemo till mobil
"Spela in [en] röstmemo"	
"Lyssna röstmemo"	Lyssna nuvarande röstmemo
"Lyssna röstmemo <nummer>"	Lyssna röstmemo på angivet index nummer
"Lyssna nästa röstmemo"	Lyssna nästa eller förre röstmemo
"Lyssna föregående röstmemo"	
"Lyssna förre röstmemo"	
"Nästa röstmemo"	Ändrar aktiv index till nästa röstmemo
"Föregående röstmemo"	Ändrar aktiv index till förre röstmemo
"Förre röstmemo"	
"Radera röstmemo"	Raderar aktiv (index) röstmemo

HouseMate eller andra omgivningskontroll metoder:

Kommando	Information
" Omgivningskontroll"	Läser upp alla omgivningskontroll kommandon.
"Omgivningskontroll kommandon"	
<omgivningskontroll kommando>	Eget kommando för enhetskontroll. Exempel "lampa på"

6. App krav och stödda mobiltelefoner

- Programkrav:
 - Android OS 6.0 or newer
 - Enheten och SIM-kort måste ha både telefon och textmeddelandestöd för att kunna använda dessa funktioner
 - Internetanslutning (mobil data eller Wi-Fi) för registreringsprocessen och andra funktioner (som väder eller diktation)
 - Text till tal

Appen (version 2.0) har testas med följande mobiltelefoner.

<i>Mobil</i>	<i>Information</i>
Samsung Galaxy S8	Android OS 7.0, Android OS 8.0, Android OS 9.0
Samsung Galaxy S7	Android OS 7.0
Samsung Galaxy J3 2017	Android OS 7.0 eller nyare
Samsung Galaxy J5 2017	Android OS 7.0 eller nyare
Samsung Galaxy J5 2016	Android OS 6.0
Samsung Galaxy J6	Android OS 8.0
Samsung Galaxy A6	Android OS 8.0
Nokia (HMD) 6	Android OS 8.1

Vi rekommenderar följande telefonmodeller:
Samsung J5 eller
Samsung J6

7. Felsökning

<i>Problem</i>	<i>Information</i>
Uppvakningsordet känns inte	Ställ in inställningarna för taligenkänning, kom ihåg att första försöket (3-5) kommer att användas för mikrofonanpassning och därmed inte tillförlitlig.
Enheten kommer inte att känna igen 'Lyssna' eller andra kommandon även efter att ha ändrat inställningarna	Se till att du är på tyst plats. Bakgrundsljud kommer att påverka för taligenkänning. Försök att ge kommandot tydligt under den tidsram som anges av tidslinjen.
Programmet känner igen det första talkommandot, men efter det kan inte något igenkännas.	Se till att text till tal fungerar.
Diktation av SMS fungerar inte.	Diktation kräver internetanslutning antingen via mobil data eller Wifi.
Jag kan inte svara inkommande samtal med röst. Inställningen visas som "grå" och kan inte väljas.	Du måste aktivera Notifieringar för DialoQ. Se anvisningarna för hur du gör de. Se att 'Inbyggd samtalläge' är sätt på.
Internetanslutning fungerar, men diktat är inte korrekt.	Se till att du är på tyst plats. Bakgrundsljud kommer att påverka för taligenkänning.
Kan jag diktera utan internetanslutning.	Tyvärr inte, men DialoQ innehåller helt tal kontrollerade textmeddelanden mallar, som kan användas utan internetanslutning.
Jag vill diktera mer än en mening.	Först diktera en mening. När mobil frågar om du vill skicka textmeddelande svar "nej". Nu frågar mobilen om du kan fortsätta textmeddelandet - svara 'ja'. När du är klar svara 'ja' för att 'skicka textmeddelande?' - fråga
Videosamtal fungerar inte.	Both caller and receiver devices needs to support videocalls via mobile network to be able to support this feature. Samsung Android devices usually supports this.
Närhetssensorstöd fungerar inte.	Kontrollera att enheten stödjer närhetssensorn. Sensorn är placerad på framsidan av enheten vanligtvis nära kamera. Närhetssensorn måste täckas ganska nära (ca 5 cm från enheten) och under 2 sekunder.
Ring till <person> fungerar inte alls.	Kontrollera att kontaktnamnet <contact xs> är skrivet utan specialtecken i mobil adressboken. Använd inte heller termer som 'Dr.' framför namne.
Taligenkänning öppnar inte meddelandemallar.	Fördefinierade meddelandemallar kan inte innehålla några specialtecken. Endast tillåtna specialtecken är makron för dynamiska fält {time} och {number}.

	Ändra meddelandemallen eller ta bort den och skriva om utan specialtecken.
Text till tal misslyckas med några meningar eller tala om den aktuella tiden.	Tyvärr finns det några kända problem med text till talmotorer. Prova med olika text till talmotorer.
Mobiltelefonens "call waiting" -funktion fungerar inte när du svarar med tal.	Detta är känt problem. Tyvärr är det inte möjligt att byta tillstånd från pågående samtal till "samtal väntar" med talkommandon. Vi rekommenderar att du stänger av funktionen "samtal väntar" från telefoninställningar.
Det finns en informationsnota som dyker upp på skärmt: '<app name> is stopped'.	En viss bakgrundsapp är kraschad. Avinstallera eller uppdatera appen.
'DialoQ is stopped' dyker upp	DialoQ är kraschad, om möjligt kontakta Code-Q med information (eller skicka fellogg med felsökningsläget under inställningar)
Resultat för taldiktation är för något annat språk än väntat.	Gå till telefoninställningarna och kolla: System - språk och inmatning - inmatningsmetoder -> Google Voice - inmatning -> language -> svenska

8. Kontaktinformation

Vi är mer än glada att höra från dig och få idéer om förbättringar.

Du kan kontakta oss genom att:

dialog@code-q.fi

eller via:

Code-Q Oy
Kirkkokatu 19 A 30
90100 OULU
Finland

DialoQ är registrerat varumärke som tillhör Code-Q Ltd.

DialoQ is registered trademark of Code-Q Ltd.