

DialoQ[®] Talk



Käyttöopas

Ohjelmistoversio 1.6.0

Code.Q

Yleistä

DialoQ Talk on kommunikointiin suunniteltu apuvälineohjelmisto Windows ja Android käyttöjärjestelmiin. Ohjelmiston voi hankkia myös ilman kommunikointiominaisuutta, kommunikointitaulujen suunnittelua ja tulostusta varten.

Tämä käyttöohje opastaa DialoQ Talkin käyttöönotossa ja esittelee ohjelmiston perustoiminnot. Käyttöohje on suunnattu DialoQ Talk ohjelmiston käyttäjälle, terapeuteille sekä käyttäjän lähipiirille. Ohjeesta löytyy neuvot yleisimpien asetusten säätämiseen, taulustojen lataamiseen sekä taulustojen muokkaamiseen.


Ohjelman päävalikko



DialoQ Talkin päävalikosta voit säätää ohjelmiston asetuksia, hallita kommunikointitaulustoja sekä avata muokkaustilan ja muokata nykyistä taulustoa.

Päävalikon oikeassa alakulmassa näkyy käytössä oleva ohjelmistoversio.

Mikäli ohjelmistoon on saatavilla ohjelmistopäivitys tai muuta käyttäjän huomiota vaativia asioita, niin se ilmaistaan ohjelman päävalikossa. Esimerkiksi ladattavissa oleva ohjelmistopäivitys näkyy seuraavasti:

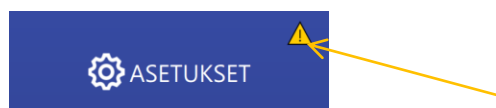

Asetukset

DialoQ Talkin asetukset avautuvat ohjelman päävalikosta. Asetusvalikon sisältö on käyttäjärjestelmäriippuvainen eli esimerkiksi kaikkia Android-version asetuksia ei löydy Windows – versiosta.




Sisäänrakennettu käyttöohje

DialoQ Talkissa on sisäänrakennettuna käyttöohje, jonka voi avata ohjelman työkalupalkilta 'Ohje' – painikkeesta.

Päivitykset

Ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa DialoQ Talkin asetusten kautta. Kun päivitys on saatavilla, se ilmoitetaan asetuksissa seuraavasti:

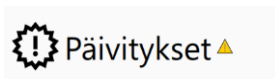

Esimerkki saatavilla olevasta päivityksestä:




Päivityksen sisällössä kuvataan mahdollisesti lisätyt ja muutetut ominaisuudet sekä tehdyt korjaukset. Päivitystä ei ole pakko asentaa, mutta se on suositeltavaa.

Päivityksen asennus ei poista käyttäjän tietoja eikä tee muutoksia käyttäjän työtilaan.

Symbolikirjastot

DialoQ Talk sisältää useita eri symbolikirjastoja kuten Bliss-symbolit, Mulberry symbolit sekä Code-Q:n omat DialoQ-symbolit.

Käyttäjän on lisäksi mahdollista hankkia kaupallisia symboleita kuten PCS-, SelkoSeks tai METACOM-symbolit.

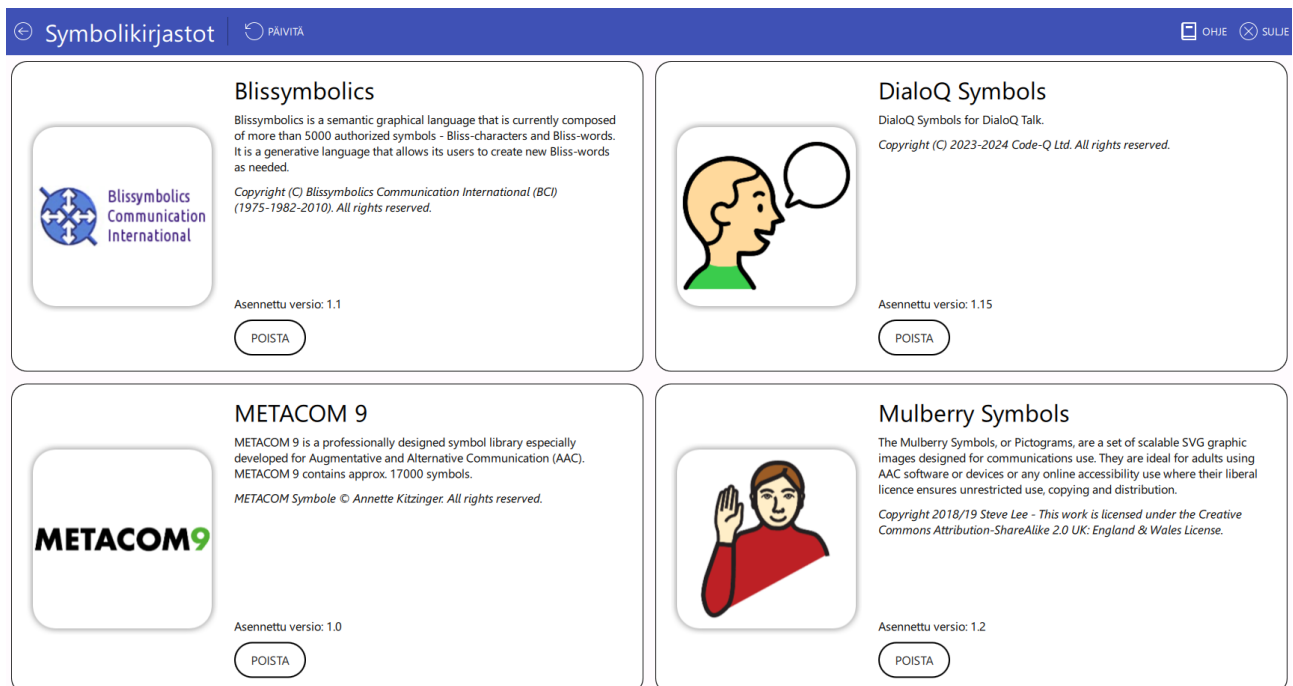


Huomaa, että kaupallisten symbolikirjastojen lisenssi ei yleensä salli symbolien tulostamista.


Pilvitalennus

Käyttäjä voi käyttää pilvitalennustilaa tauluston varmuuskopiointiin. Google Drive – toimii sekä Windows- että Android järjestelmissä.

← Pilvitalennus

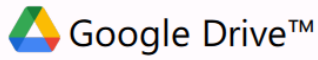


Ota varmuuskopiointi käyttöön yhdistämällä Google Drive.

 KIRJAUDU GOOGLE-TILILLÄ

1. Kirjaudu ensin Google – tilille käyttämällä Pilvitalennus-asetuksen kohtaa 'Kirjaudu'
2. Salli DialoQ Talkille lupa muokata ja lukea Google Drive tiedostoja:

Select what **DialoQ Talk** can access

 See, edit, create, and delete only the specific Google Drive files you use with this app. [Learn more](#)

Because you're using Sign in with Google, DialoQ Talk will be able to

 Associate you with your personal info on Google


 See your primary Google Account email address

Make sure you trust DialoQ Talk

You may be sharing sensitive info with this site or app. Learn about how DialoQ Talk will handle your data by reviewing its [privacy policies](#). You can always see or remove access in your [Google Account](#).

[Learn about the risks](#)

3. Sulje selainikkuna, kun saat ilmoituksen, että kirjautuminen onnistui:

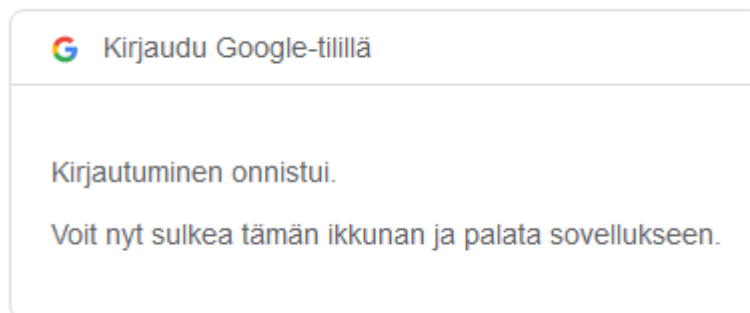

4. Nyt tiedostonhallinnassa on mahdollista avata ja tallentaa pilvitalennustilaan.

Puhe

Puheäänen asetukset, suomenkielisessä Windows-versiossa valitse puheääneksi taivuttavan sisällön kanssa DialoQ Taivutin, itse äänivalinta tehdään DialoQ Taivuttimen asetuksista. Huomaa, että DialoQ Talk on 64-bittinen eli myös valittavan äänen tulee olla 64-bittinen (taivuttimen asetuksissa).

Mikäli käytät Android-versiota tai et käytä taivuttavaa sisältöä Windows-laitteessasi valitse suoraan ääneksi haluttu puheääni. Android-versiossa voit erikseen asetuksella valita käytetäänkö Taivutinta (näkyvillä jos Taivutin on hankittu käytössä olevaan lisenssiin).

Muut puheasetukset:

- Keskeytä nykyinen puhe, mikäli laite on puhumassa esimerkiksi pitkää lausetta niin se keskeytetään, mikäli käyttäjä käyttää laitetta uuden puheen tuottamiseen.
- Puhu painikkeen sisältö, eli puhevihje – puhutaanko painikkeen sisältö valittaessa vaiko ei. DialoQ Talk puhuu kuitenkin pitkät valmiit lauseet, vaikka tämä ei olisi valittuna.
- Taivuta sanat (vain Android tällä hetkellä), mikäli päällä niin puhevihje taivutetaan suoraan oikeaan muotoon, lisäksi puhutaan koko muuttunut viestikentän sisältö.

Ennustus

Valinta ennustavalle tekstinsyötölle sekä käytössä olevalle teknologialle.

Sanastot – valinnat ovat käytettävissä, mikäli otat käyttöön DialoQ Talkin teknologian. Sanastojen alta voit ladata oletussanastot tekstikommunikoinnille tai luoda täysin tyhjän sanaston esimerkiksi symbolikommunikoinnin ennusteita varten:



DialoQ Talkin ennustava tekstinsyöttö oppii uudet sanat ja sanayhdistelmät automaattisesti aina kun viestikentän sisältö puhutetaan.


Opitun sanaston voi tyhjentää 'Poista' – asetuksella. Varmuuskopio – asetuksella käyttäjä voi varmuuskopioida oman sanaston.

Tässä käyttöohjeessa neuvotaan miten ennustusta voi hyödyntää omissa taulustoissa, joko tekstikommunikoinnin tai symbolikommunikoinnin yhteydessä.

Muokkaustilan asetukset

Muokkaustilan asetukset määräävät miten DialoQ Talk käyttäytyy muokkaustilassa.

Esimerkiksi asetuksista voidaan asettaa, miten uudessa painikkeessa asetellaan symboli ja teksti. Symbolin ja tekstin sijaintia pystysuunnassa voi lisäksi säätää liukukytkimin, näin symbolille voi antaa automaattisesti vähän marginaalia painikkeen sisällä.

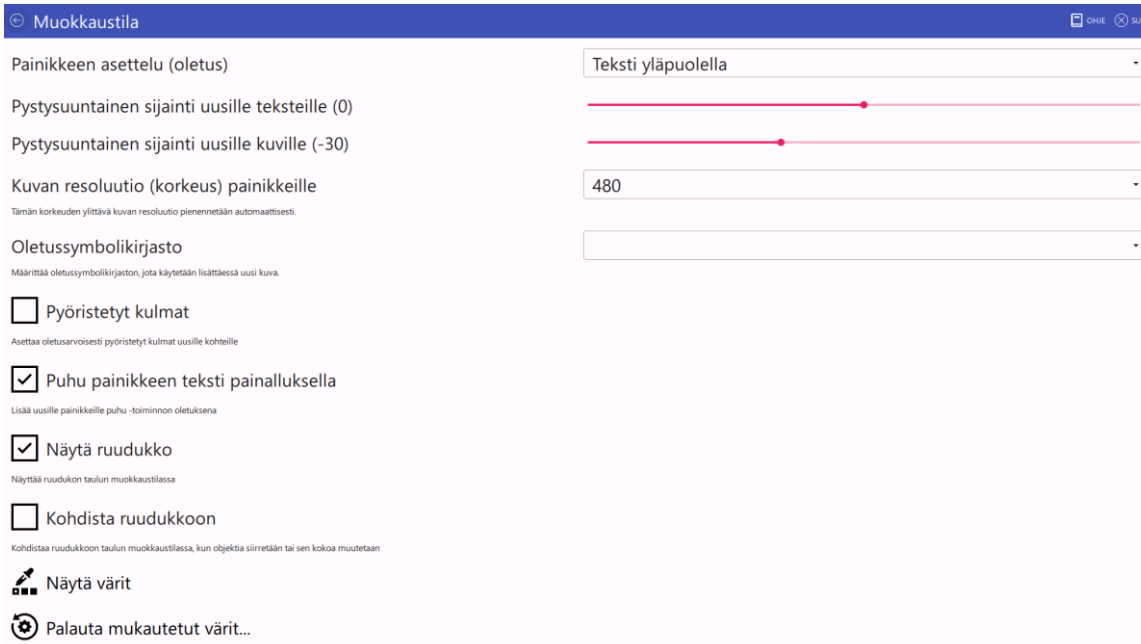

Muokkaustila OHJE SULJE

Painikkeen asetelu (oletus) Teksti yläpuolella

Pystysuuntainen sijainti uusille teksteille (0)

Pystysuuntainen sijainti uusille kuville (-30)

Kuvan resoluutio (korkeus) painikkeille 480

Tämän korkeuden ylittävä kuvan resoluutio pienennetään automaattisesti.

Oletussymbolikirjasto

Määrittää oletussymbolikirjaston, jota käytetään lisättäessä uusi kuva.

Pyöristetyt kulmat

Asettaa oletusarvoisesti pyöristetyt kulmat uusille kohteille

Puhu painikkeen teksti painalluksella

Lisää uusille painikkeille puhu -toiminnon oletuksena

Näytä ruudukko

Näyttää ruudukon taulun muokkaustilassa

Kohdistaa ruudukkoon

Kohdistaa ruudukkoon taulun muokkaustilassa, kun objektia siirretään tai sen kokoa muutetaan

Näytä värit

Palauta mukautetut värit...


Muokkaustilan asetuksissa voit myös asettaa painikkeeseen lisättävän kuvan resoluution. Tämä muuttaa automaattisesti painikkeeseen lisättävän kuvan soveltuvampaan resoluutioon (eli painikkeeseen ei tallenneta turhaan megatavujen kokoisia kuvia).

Mikäli muokkaustilassa valitsee 'Oletussymbolikirjaston' niin muokkaustilassa työkalupalkin 'Lisää kuva' avaa suoraan valitun symbolikirjaston. Tämä nopeuttaa käyttöä, mikäli käytössä on vain yksi symbolikirjasto. Muut valinnat saa näkyviin painamalla 'Lisää kuva' – valintaa pitkään.

Pyöristetyt kulmat sekä puhu painikkeen teksti – asetukset ovat oletusasetuksia uudelle painikkeelle. Jos nämä ovat päällä niin uusi painike tehdään pyöristettynä ja siihen lisätään automaattisesti mm. puhetoiminto.

Muokkaustilan ruudukon avulla voit kohdistaa painikkeen liikuttelun suoraan ruudukkoon, jolloin suorien linjojen luonti on helpompaa.

Asetuksien "Näytä värit" – avaa värivalitsimen:

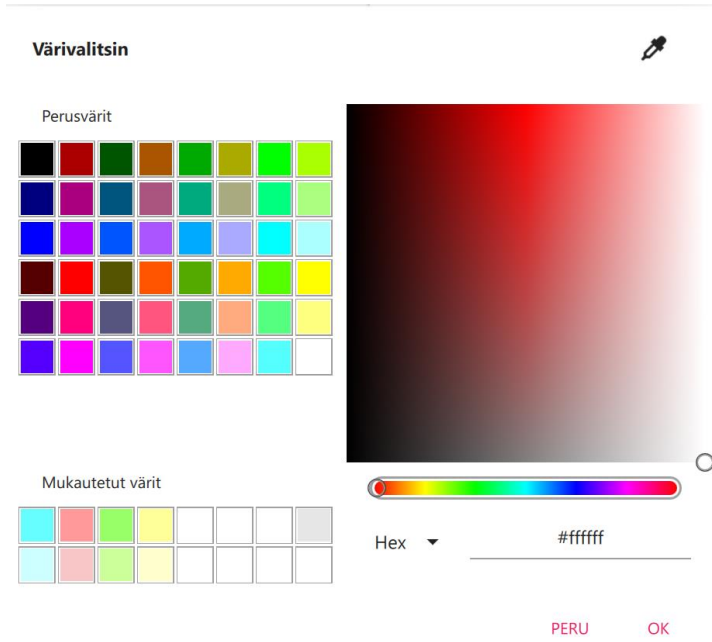

Värivalitsimen avulla voit määritellä itse omia mukautettuja värejä. Oletuksena mukautettuihin väreihin on valittu yleisimmin käytössä olevat Bliss-värit.

Käyttötilan asetukset

Käyttötilan asetukset:



1. Katseohjaus

Mikäli käytössä on katseohjaus, valitaan käytössä olevan ohjain ja sen asetukset 'Katseohjaus'-valikon takaa. Täällä voi tehdä mm. katseohjaimen kalibroinnin sekä säätää katseohjaukseen liittyviä asetuksia kuten automaattisen valinnan viiveet.

2. Valinta hiirellä

Asetukset käyttöön hiiren tai hiiriavustimen kanssa. Sisältää muun muassa automaattisen klikkauksen sekä erilaiset viiveet valinnan tekoon.

Tätä asetusta voi käyttää myös tauluston käyttöön kosketusnäytöltä sormeaa liu'uttamalla.

3. Poistumistapa

← Poistumistapa OHJE SULJE

Poistu ESC-näppäimellä

Poistu pitkällä painalluksella

Pitkän painalluksen viive (1.5 s)
Kuinka monta sekuntia, kunnes pitkä painallus hyväksytään.

Pitkän painalluksen kynnyks (29 pikseliä)
Kuinka paljon liikettä on sallittu keskeyttämättä pitkää painallusta.

Poistumistapa Ei mitään ▾

Näytä työkalut poistuttaessa

Pikamuokkaus Yksinkertaistettu ▾

Poistumistapa, käyttäjän valittavissa oleva poistumistapa käyttötilasta.

- Poistu ESC-näppäimellä ja / tai
- Poistu pitkällä painalluksella

Voit valita pitkän painalluksen viiveen ja painalluksen valintakynnyksen. Valintakynnyksen suurentaminen helpottaa pitkän painalluksen rekisteröintiä, mikäli kosketusnäyttö ei ole niin herkkä tai käyttäjän sormet liikkuvat painalluksen aikana.

Poistumistapa, eli miten poistuminen varmistetaan pitkän painalluksen/ESC:n jälkeen:

- Ei mitään, paluu päävalikkoon tai työkalunäyttöön suoraan
- Liuku, liukukytkin käyttötilasta poistumiseen
- Yhdistelmälukko, pyöryksellä avattava lukitus
- Pin-koodi, numeroin syötettävä lukitus

Yhdistelmälukossa ja pin-koodissa voit asettaa oman pin-koodisi:

Poistumistapa	Yhdistelmälukko
Koodi	_____

Koodi 7706 toimii ns. Master-koodina eli sillä näytön lukituksen saa aina avattua!

Työkaluikkuna:

Mikäli haluat, että poistumisen yhteydessä näytetään työkaluikkuna, valitse 'Näytä työkalut poistuttaessa' asetuksista. Tämä työkaluikkuna näyttää mm. hakutoiminnon sekä pikamuokkausvalinnan.



HAKU



LUVAT



MUOKKAA TAULUA



POISTU
TAULUSTOSTA

Pikamuokkauksella käyttäjä voi muokata suoraan käyttötilassa olevaan taulua ja muokkauksen jälkeen palata suoraan käyttötilaan samaan tauluun. Pikamuokkaustilan asetus 'yksinkertaistettu' on tarkoitettu käyttäjille, jotka eivät halua muokata painikkeiden toimintoja tai taulun asettelua (esim. lisätä painikkeita tai muuttaa niiden asemointia ja kokoa).

Luvat-asetuksella voidaan nopeasti kieltää tai sallia mm. kameran ja mikrofonin käyttö käyttötilassa. Eli mikäli esimerkiksi halutaan kieltää kesken oppitunnin käyttäjältä kameran käyttö.

4. Viestikenttä, viestikentän käyttäytyminen käyttötilassa

Viestikentän asetukset, kuten miten se käyttäytyy valittaessa ja näytetäänkö sisäänrakennettu toimintopainike.

5. Oma sisältö

Käyttäjän omiin mediatiedostoihin liittyvät asetukset mm. galleriaan tallennus ja tallennusresoluutio. Asetuksista voi myös piilottaa poistopainikkeen, jotta käyttäjä ei vahingossa poista jo tallennettuja kuvia esimerkiksi viikkokalenterin yhteydessä.

6. Aktivoi käynnistyksen yhteydessä, käynnistää käyttötilan (työtilaan ladatun tauluston kotisivun) automaattisesti DialoQ Talkin käynnistyessä.
7. Suorita ikkunassa (vain Windows-versio), käyttötilaa suoritetaan ikkunassa kokoruututilan sijaan.
8. Uudelleenpainalluksen viive, kuinka nopeasti rekisteröidään käyttäjän seuraava painallus. Tämä asetus on tärkeä, jos käyttäjällä on tapana syöttää yhtä painiketta yhtäjaksoisesti.

Järjestelmä

Laitteen järjestelmäasetukset, jotka riippuvat käytössä olevasta laitteesta ja käyttöjärjestelmästä. Muun muassa DialoQ Talkin automaattinen käynnistys Windows-laitteessa tai Android – laitteen järjestelmäasetuksien muuttaminen.

Esimerkiksi Androidin kioskitalasta poistuminen on mahdollista sallia järjestelmävalikon kautta.

Varmuuskopio


Voit varmuuskopioida taulustojen lisenssikoodit, asetukset sekä sanaston. Varmuuskopioidut tiedot voi palauttaa käyttöön samasta kohdasta.

Virheraportti

Mikäli ohjelman käytössä on ongelmia, käyttäjä voi asettaa lokitiedoston käyttöön. Tämän jälkeen toista ongelma ja tallenna raportti ja lähetä se ohjelmiston kehittäjälle (bugreports@code-q.fi).

Taulustojen avaus ja tallennus

Taulustojen avaus ja tallennus onnistuu DialoQ Talkin päänäytön keskeltä taulustojenhallinnasta (nykyisen tauluston nimen kohdalta):

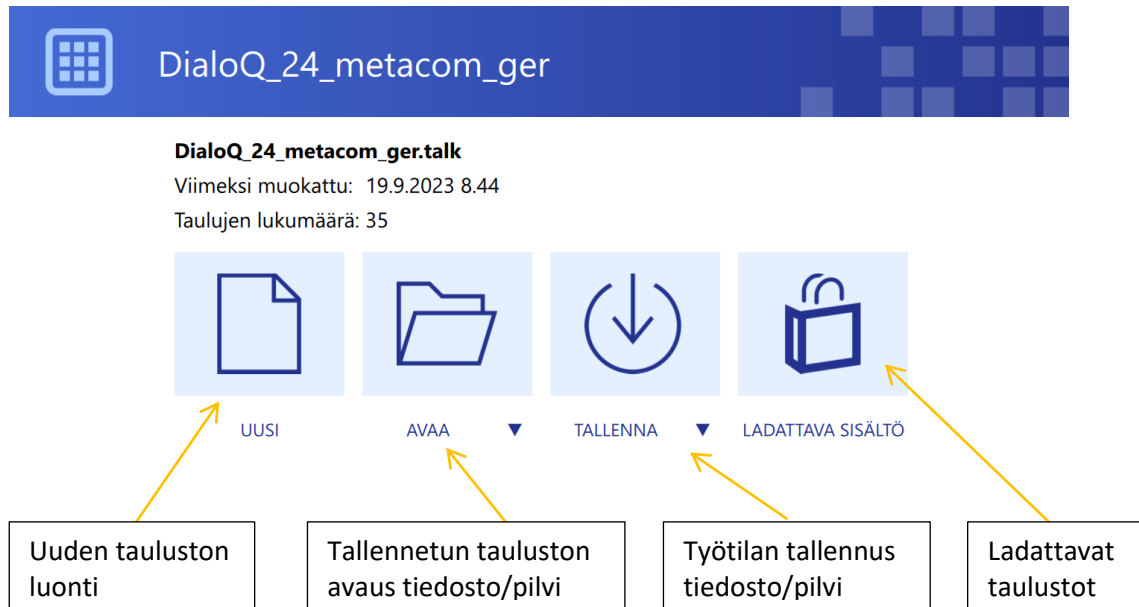

Avoinna olevan tauluston tiedot näkyvät myös tässä näkymässä. Mikäli taulusto on avattu pilvipalvelusta niin myös tauluston tila näkyy tässä (synkronointi).

Työtila

DialoQ Talk käsittelee avattua taulustoa niin sanotussa työtilassa. Kaikki muutokset tehdään työtilaan ja avattu tiedosto toimii näin automaattisena varmuuskopiona, johon voidaan tarvittaessa palata.

Kun taulusto on muokattu käyttäjälle sopivaksi kannattaa onnistuneet muutokset taulustoon tallentaa uuteen tiedostoon tallenna-toiminnolla. Tallennus kannattaa myös tehdä esimerkiksi pilvipalveluun tai USB-tikulle mahdollista laiterikkoa varten.

Pilvitallennuksessa kannattaa huomioida se, että esim. Google Drive tekee tiedostoista automaattisesti myös varmuuskopiot eli palaaminen esim. aiempaan versioon onnistuu helposti.







Ladattava sisältö

DialoQ Talkin on saatavilla kaikki yleisimmin käytössä olevat kommunikointitaulustot. Nämä taulustot on ladattavissa 'Ladattava sisältö' – valinnan kautta.

Huomaa, että tarvitset lisenssin kaupallisen tauluston avaamiseen. Tauluston ohessa on yhteystiedot, joiden kautta lisenssin hankkiminen onnistuu.

Ladattava sisältö Suomi

HAKU OHJE SULIE

 <p>Versio: 1.3</p> <p>LATAA</p>	 <p>Versio: 1.3</p> <p>LATAA</p>
 <p>Jätti-AACi Koulu</p> <p>Jätti-AACi Koulu on Super-AACi kommunikointikansion käyttöperiaatteita ja visuaalista ilmettä mukaileva taulusto.</p> <p>AACi-tilaukset: aaci@valteri.fi</p> <p>Versio: 1.7</p> <p>AVAA POISTA</p>	 <p>Jätti-AACi Aikuiset</p> <p>Jätti-AACi aikuiset on Super-AACi kommunikointikansion käyttöperiaatteita ja visuaalista ilmettä mukaileva aikuisille suunniteltu taulusto.</p> <p>AACi-tilaukset: aaci@valteri.fi</p> <p>Versio: 1.5</p> <p>LATAA</p>
 <p>Jätti-AACi Päiväkoti</p> <p>Jätti-AACi Päiväkoti on Super-AACi kommunikointikansion käyttöperiaatteita ja visuaalista ilmettä mukaileva taulusto.</p> <p>AACi-tilaukset: aaci@valteri.fi</p> <p>Versio: 1.3</p> <p>LATAA</p>	 <p>Kipinä Koulu</p> <p>Kommunikointitaulusto Kipinä on kommunikointikansio Kipinän sähköinen versio: se mukaillee Kipinä-kansion rakennetta ja periaatteita, mutta siinä on hyödynnetty tietokoneen hyviä ominaisuuksia viestinnän helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Puheessa eniten käytetyt sanat eli ydinsanat ovat Kipinä-taulustossa vahvasti edustettuina. Kipinä-taulustoa voidaan käyttää myös katseohjauksella erillisen puhu-ruudun ansiosta.</p> <p>Kipinä-tilaukset: info@kipinakeskus.fi</p> <p>Versio: 1.2</p> <p>AVAA POISTA</p>

Ennen kuin avaat ladattavan sisällön kautta uusia taulustoja, muista tallentaa oma taulustosi ja työtilasi tiedostoon.

Tauluston tallennus

Työtila tallennetaan 'Tallenna nimellä' tai 'Tallenna nimellä pilveen' – toiminnolla. Käytä tätä aina, kun olet tehnyt muutoksia, jotka haluat säilyttää.

Mikäli teet muutoksia lisenssillä suojattuun taulustoon, niin myös tallentamasi talk-tiedosto on lisenssisuojattu eli tiedoston avaamiseen toisella laitteella vaaditaan (oma) lisenssikoodi. Jos teet täysin uuden tauluston tai muokkaat ilmaisia sisältöjä, niin niiden avaaminen onnistuu toisella laitteella ilman lisenssiä.

Mikäli teet tauluston, jonka haluat ladattavaksi sisällöksi myös muille DialoQ Talk – käyttäjille (joko lisenssisuojattuna tai ilmaisena) niin ole yhteydessä dialoq@code-q.fi.

Käyttäjän omat tiedot

Huomaa, että DialoQ Talk mahdollistaa erittäin helpon käyttäjän oman tiedon lisäämisen niin kameran, mikrofoniin kuin viestienkin suhteen. Näiden lisäksi käyttäjän on mahdollista piirtää, joko otetun kuvan päälle tai tyhjälle piirtoalustalle.

Kun tallennat työtilan talk-tiedostoon niin tämä tiedosto sisältää myös kaiken käyttäjän oman materiaalin kuten valokuvat ja piirrokset. Kamera-toiminnolla otetut kuvat tallennetaan myös laitteen galleriaan, mikäli tämä asetus on päällä ohjelman asetuksista.

Tauluston varmuuskopiointi

DialoQ Talkin työtila on tila, johon tallennetaan kaikki muutokset. Avattu tiedosto ei siis muutu automaattisesti vaan se pysyy alkuperäisenä niin kauan kunnes tallennat työtilan esimerkiksi 'Tallenna' valinnalla alkuperäisen tiedoston päälle.

Ladattava sisältö avataan aina työtilaan eikä sitä näin tallenneta omana tiedostona automaattisesti.

Kun olet tehnyt taulustoon käyttäjäkohtaiset muutokset, tallenna se aina tiedostoon, jotta taulustosta ja muutoksista säilyy varmuuskopio. Jos haluat tallentaa tiedoston pilvipalveluun valitse 'Tallenne nimellä pilveen'.



Pilvitallennus ja varmuuskopiointi


DialoQ Talkin uudet versiot sisältävät etähallintamahdollisuuden. Etähallintaan voit käyttää esimerkiksi Google Drive tai Dropbox-palveluita. Uusimpaan DialoQ Talk ohjelmistoversioon on integroitu Google Drive tuki. Kirjaudu Talk-laitteella käyttäen omaa gmail-tunnusta palveluun DialoQ Talkin asetuksista kohdasta 'Pilvitallennus'.

Kirjautumisen jälkeen voit tallentaa tauluston pilvipalveluun ja/tai avata sieltä sinulle jaettuja tiedostoja.


Huom! Google on muuttanut Google Driven käyttöä kolmannen osapuolten sovellusten kanssa. Näin tiedostojen jakaminen suoraan DialoQ Talkista ei ole enää mahdollista.

Muokkaustila

Muokkaustilassa käyttäjä voi muokata taulustossa olevia tauluja, luoda uusia tauluja sekä kopioida taulun pohjaksi uudelle taululle.

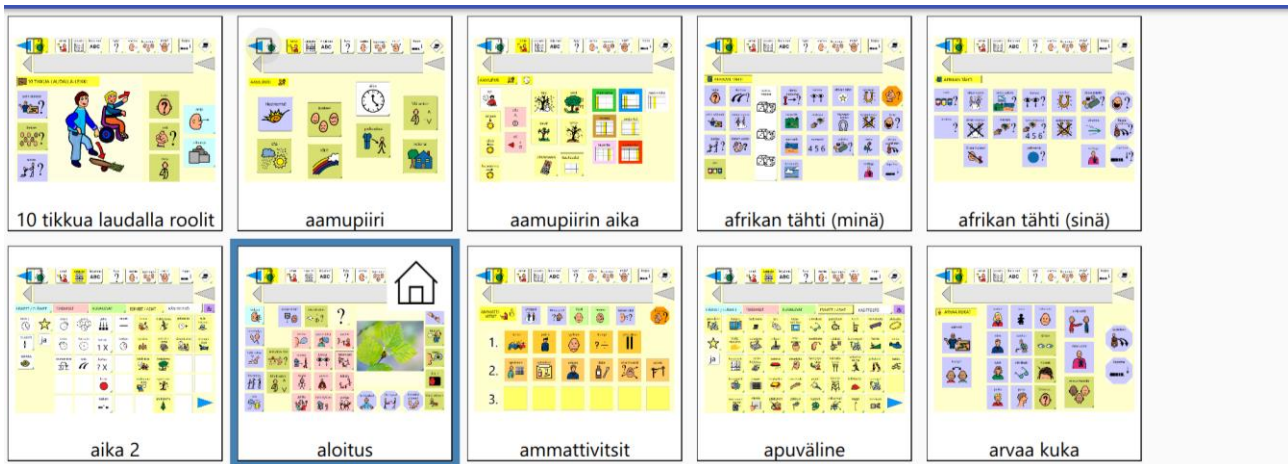

Muokkaustilan taulunäkymässä voit järjestää taulut myös muokkausajankohdan mukaan, tällä tavalla näet esimerkiksi käyttäjän viimeksi muokkaamat taulut:

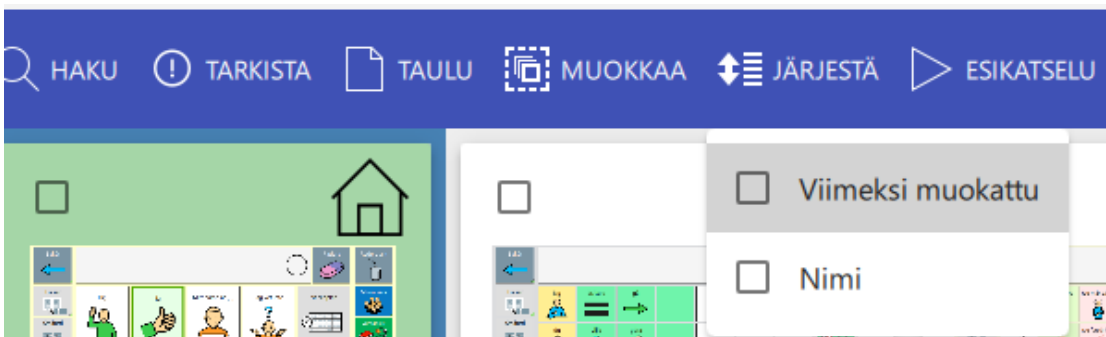


Hakutoiminto

DialoQ Talkin muokkaustilassa on erittäin monipuolinen hakutoiminto, jonka avulla käyttäjä voi hakea taulua esimerkiksi taulun nimen tai sisällön perusteella.



Haku-toiminto etsii tiedot avoimena olevan tauluston kaikista tauluista. Hakutavan valinnalla käyttäjä voi rajoittaa hakua esimerkiksi täsmä-hakuna juuri tiettyyn sanaan.


Esimerkiksi, jos käyttäjä haluaa etsiä kaikkia sanaan 'jalka' liittyviä tauluja, käyttäen taulun sisältöä, niin se onnistuu seuraavasti:

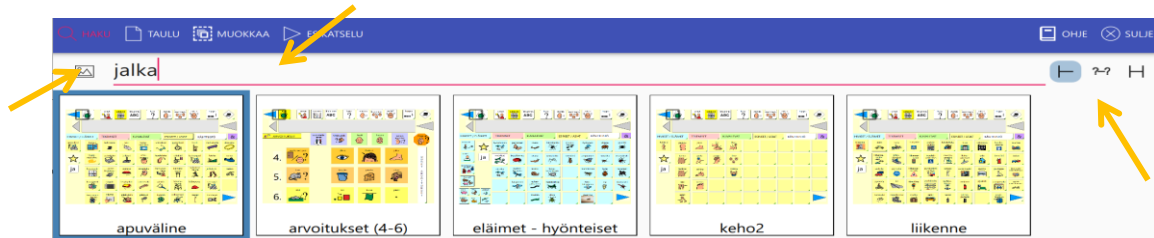


- muuta ensin hakukohteeksi taulujen sisältö
- kirjoita haettava sana 'jalka' hakukenttään
- mikäli haluat etsiä myös sanojen välistä tai täsmähauulla, muuta hakutapaa
- tuloksissa näkyy kaikki ks. tekstin sisältävät taulut

Taulun muokkaus

Valitse muokattava taulu taulunäkymästä, ja näpäytä taulua uudelleen tai käytä työkalupalkin 'Muokkaa' – toimintoa. Taulu avautuu muokkaustilaan:

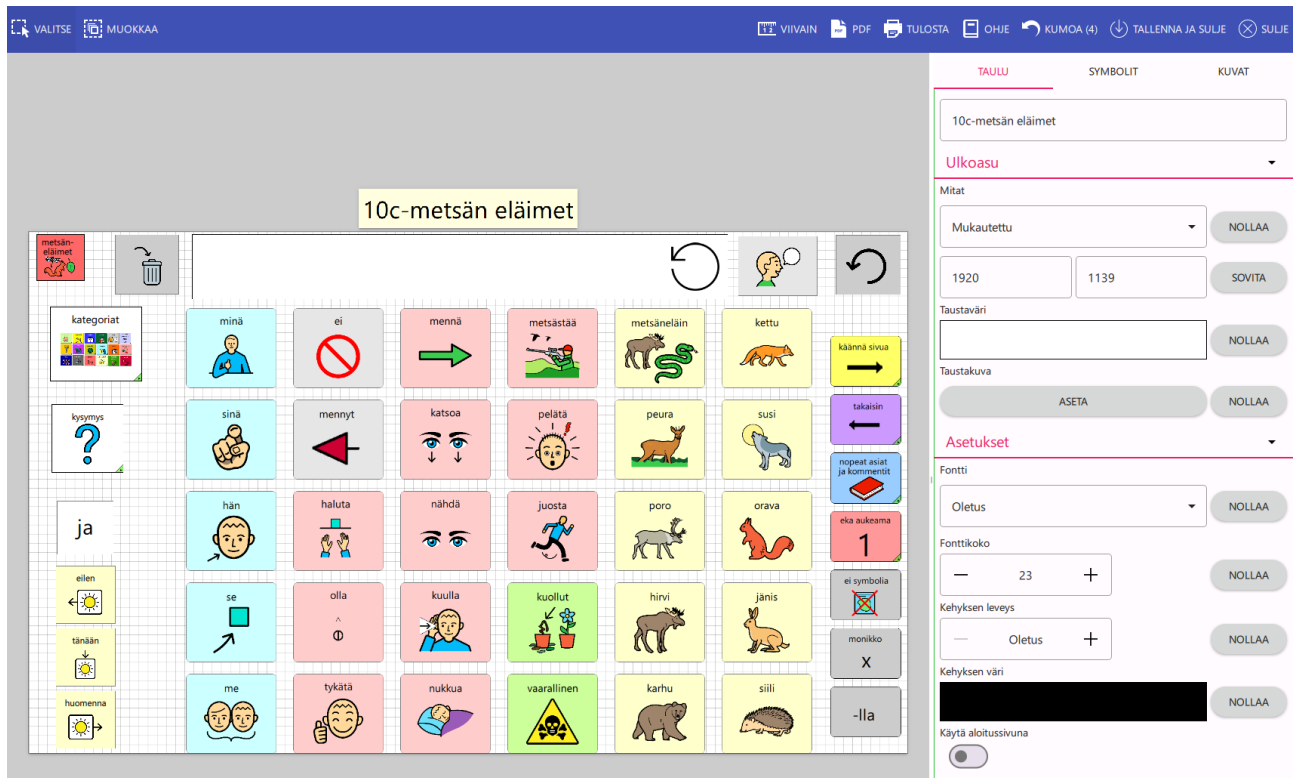

Valitun objektin tiedot näkyvät aina oikealla ominaisuusnäytössä, esimerkissä näkyy avatun taulun tiedot. Käyttäjä voi tehdä erittäin tarkkaa työskentelyä zoomaamalla taulua, joko kosketusnäytön kahden sormen 'zoomaus'-eleellä tai käyttäen hiiren rullaa (ylös/alas):

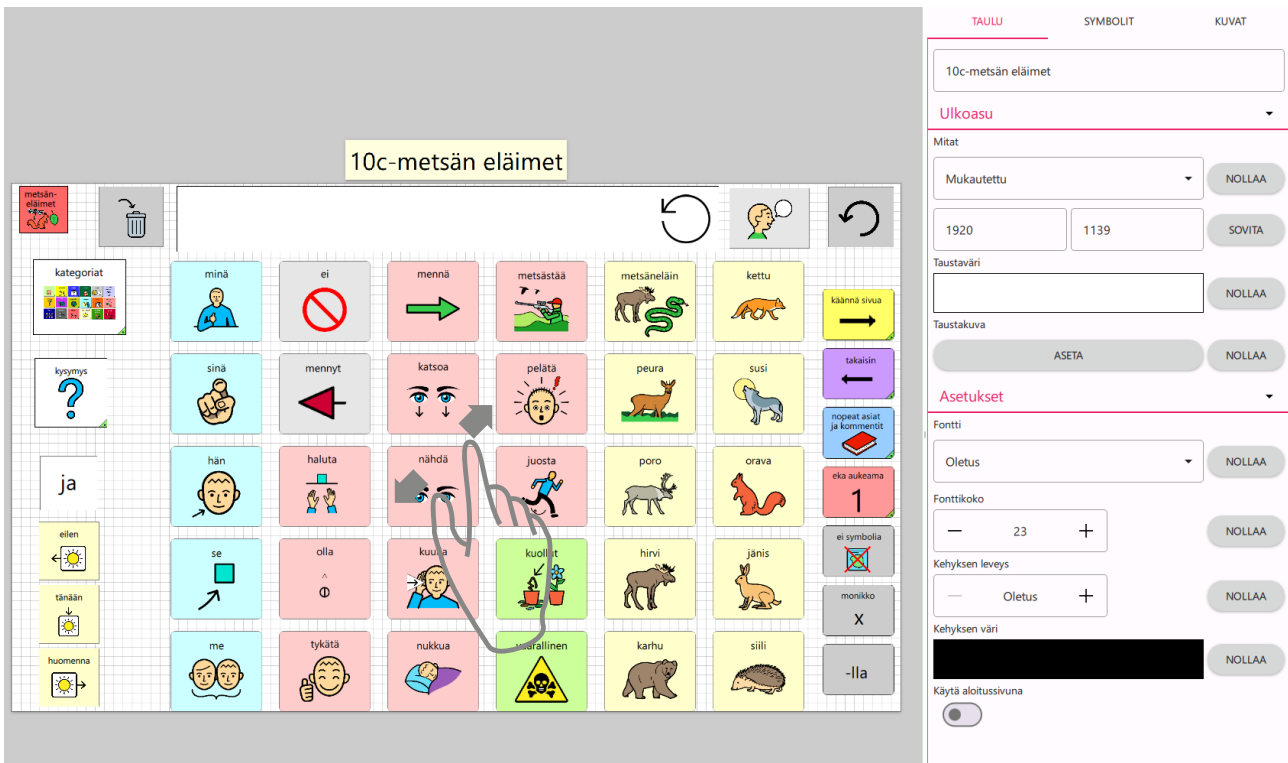

Kun muokattava objekti on valittuna, ominaisuusnäyttöön (oikealla) tulee objektin tiedot. Mikäli käyttäjä haluaa siirtää esimerkiksi painiketta, se onnistuu suoraan tarttumalla objektiin ja siirtämällä hiiren tai sormen avulla painike haluttuun paikkaan.



Tarkempi siirto ja objektin koon muutos onnistuu valitsemalla objekti ja muuttamalla ominaisuusnäytön koko ja sijaintiarvoja tai käyttämällä näppäimistön kursoripainikkeita. Näppäimistö mahdollistaa erittäin tarkan liikuttelun pikseli kerrallaan, taustaruutu kerrallaan siirtyminen on mahdollista CTRL+nuolinäppäimet yhdistelmällä.

Siirrettäessä hiirellä tai kosketusnäytöllä voit käyttää hyväksesi apuviivoja, jotka kertovat siirrettävän objektin sijoittelusta muihin taulun objektien suhteen.


Valitun objektin kokoa voi muuttaa painamalla Shift-näppäin pohjaan ja käyttämällä kursoripainikkeita, tämä kasvattaa tai pienentää kokoa pikselin tarkkuudella, CTRL+Shift+nuolinäppäimet muuttavat kokoa taustaruudun verran.

Kosketusnäytöltä objektin kokoa voi muuttaa tartuntapisteistä tai käyttäen oikealla puolella olevaa ominaisuusnäyttöä.

Objektien sijoittelu ja tasaus

Valittua objektia voi siirtää näytöllä joko hiiren tai kosketusnäytön avulla. Kun objektia liikuttaa taulussa, näytölle piirtyy apuviivat eli kohdistusviivat, joiden avulla objektin voi tasata esim. vieressä olevien objektien kanssa samaan linjaan.

Esimerkiksi alla oleva 'Kysyn'-painike on tasattu:

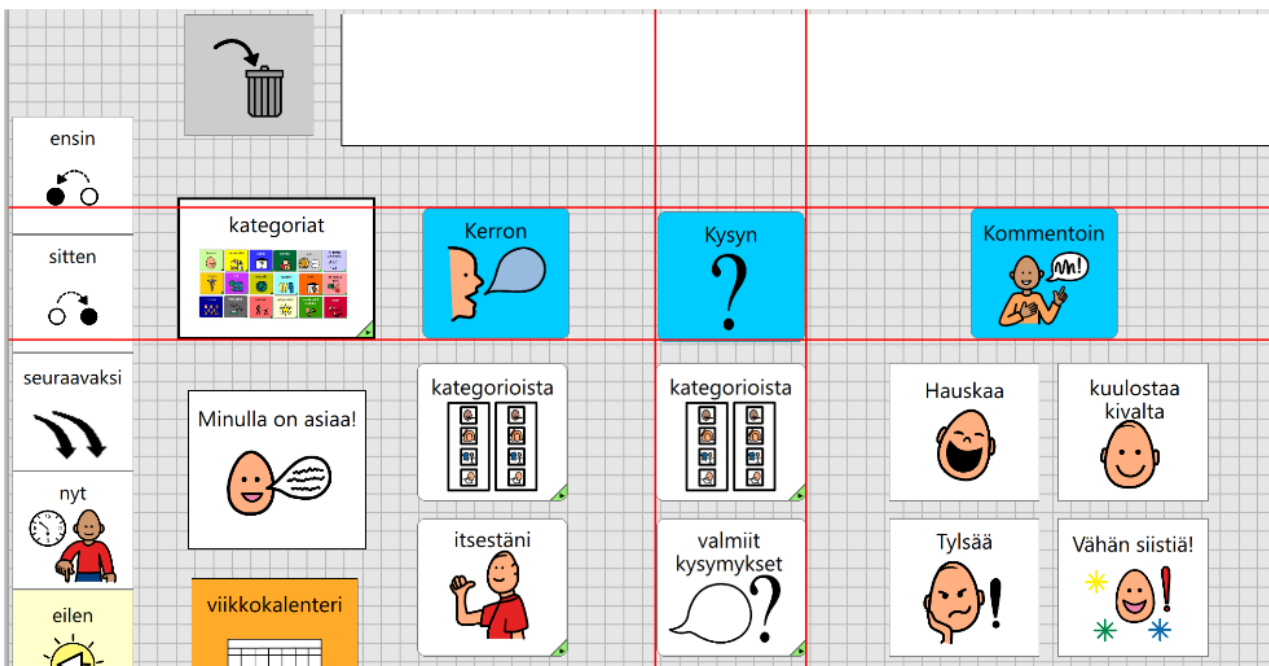

Jos valitset Valinta-työkälulla (kts. kohta Objektien valinta) useamman objektin niin nämä voidaan tasata DialoQ Talkin omalla toiminnolla.



Tasaus ja muut toiminnot tehdään **valittuna olevan objektin (punaiset reunat)** mukaisesti.


DialoQ Talkin työkaluilla voit myös muokata painikkeet samankokoisiksi ja tasata tasaisin välein näytölle. Esimerkiksi:



Muutokset tehtäisiin **'Kommento'** – painikkeen mukaisesti (valittu – punaisella rajattu painike) esim. samankokoiseksi toiminto muuttaisi kaikkien valittujen objektien koot 'Kommento' - painikkeen kokoiseksi.

Objektien muokkaus, monistus ja valinta


Objektin ollessa valittuna työkaluriville tulee toimintoja, joiden avulla voit esimerkiksi vaihtaa kahden painikkeen paikkaa, monistaa yhtä painiketta tai vaikka valita useamman painikkeen ja tasata ne halutun reunan mukaisesti.

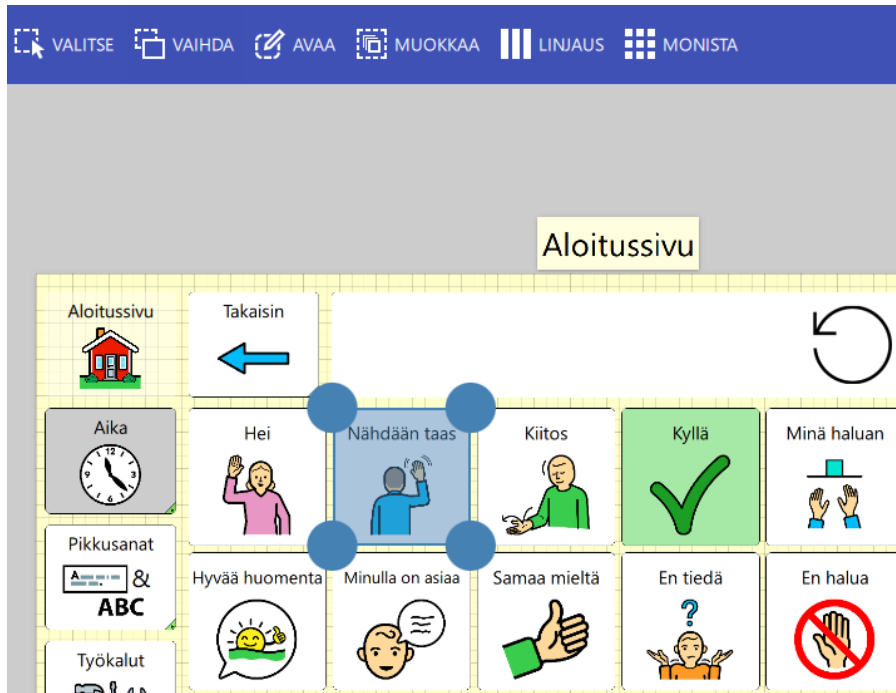


Valitse	Valintatyökalulla voit valita useamman objektin joko näytöltä valitsemalla tai klikkaamalla useampaa painiketta valitse-työkalun ollessa aktiivinen. Kun valinta on tehty, poista valintatyökalu päältä esim. siirtääksesi valittuja objekteja.
Vaihda	Vaihda-painikkeella voit vaihtaa kahden objektin sisältöä keskenään. Objektien koot pysyvät samana, mutta sisältö vaihtuu. Valitse ensin objekti ja sen jälkeen 'Vaihda' – työkalu. Nyt valitse toinen objekti, jonka sisällön haluat vaihtaa ensiksi valitun kanssa.
Linjaus	Jos valittuna on useampi objektin voit esim. tasata valinnan vaaka tai pystysuoraan pohjaan nähden. Useamman objektin osalta voit myös mm. tasata valinnan ruudukkoon.
Monista	Valitse ensin objekti ja tämän jälkeen 'Monista'. Työkalua avaa valintaikkunan, jonka avulla voit määrittellä miten valittua objektia monistetaan (rivi ja sarakeväli sekä lukumäärää ja asettelu). Monista alkuperäinen – valinta monistaa myös alkuperäisen valitun objektin.

Viestikentän lisäys

Viestikentän voi lisätä näpättämällä taulua kohdasta, johon viestikentän haluaa:

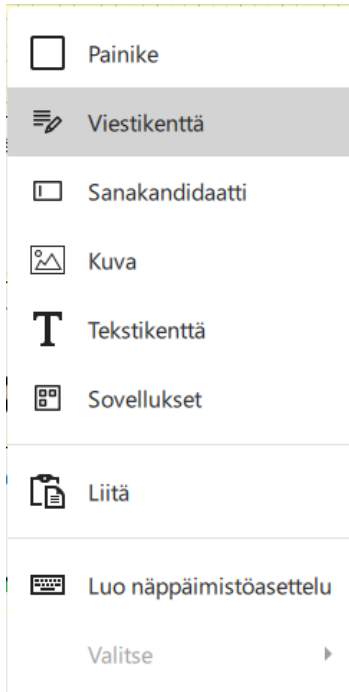

Viestikentän ominaisuusnäytöstä voidaan säätää taulussa näkyvän viestikentän kokoa, sijaintia ja muita ulkoasuun liittyviä asetuksia.

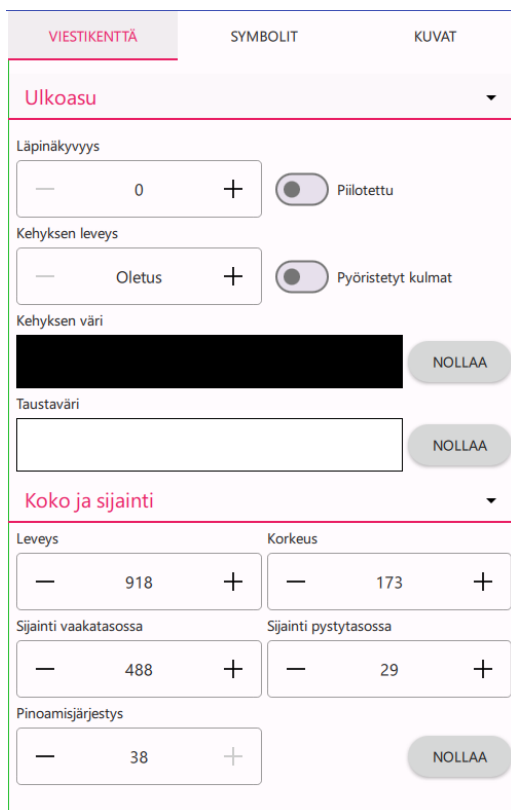


Viestikentän käyttäytymisasetukset ovat käyttäjäkohtaisia ja niitä voi säätää DialoQ Talk – asetuksista kohdasta Viestikenttä. Näistä asetuksista voi säätää mm. miten viestikenttä käyttäytyy, kun käyttäjä valitsee viestikentän käyttötilassa.


Ohjelman asetuksista voit myös asettaa päälle tai pois viestikentän sisäisen toimintopainikkeen, jolla voi poistaa edellisen merkin sekä täysin tyhjässä viestikentässä näyttää edellisen puhutun viestin (esim. uudelleenkirjoitusta tai puhutusta varten).

Painikkeen lisäys


Uuden painikkeen voi luoda näpäyttämällä taulua kohdasta, johon painikkeen haluaa:

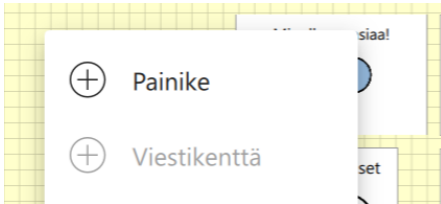

Valitse 'Painike', tämä avaa painikkeen muokkaustilan. Painikkeen voi uudessa DialoQ Talkin versiossa lisätä myös taulunäkymässä valitsemalla 'Symbolit' ja etsimällä oikean symbolin halutusta symbolikirjastosta:

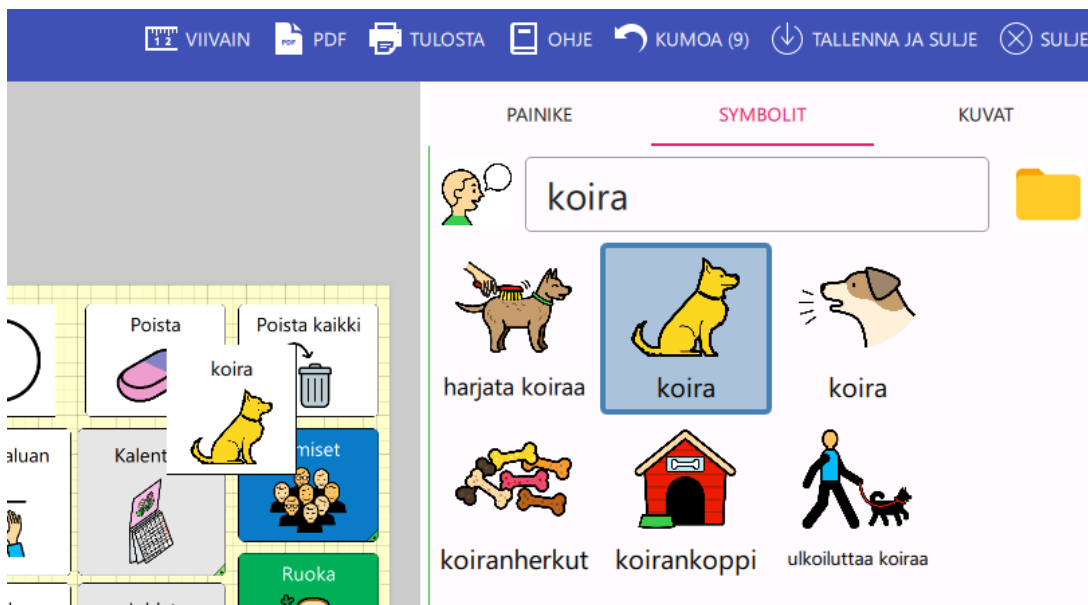

Valitse haluttu symboli ja vedä se symbolinäköymästä tauluun. Mikäli haluat käyttää samoja ominaisuuksia kuin jossain tiettyssä painikkeessa (esim. taustaväri) – valitse tämä painike ja sen jälkeen vedä symboli tauluun.

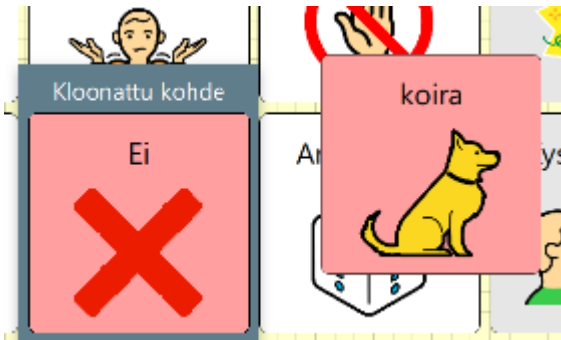


Esimerkissä 'Ei' – painike on valittuna kun 'koira' symboli vedetään tauluun, tämä kopioi 'Ei' – painikkeen ominaisuuudet kuten taustaväriin ja painikkeen koon uuteen painikkeeseen.

Painikkeen muokkaustila

Painikkeen muokkaustilassa voidaan asettaa painikkeelle kuvat, tekstit ja toiminnot. Kuvia, symboleita ja tekstejä voi olla yksi tai useampia yhdessä painikkeessa.

Valitse painike muokkaustilaan aina kun haluat esimerkiksi asemoida sisältöä tai lisätä useamman symbolin painikkeeseen.

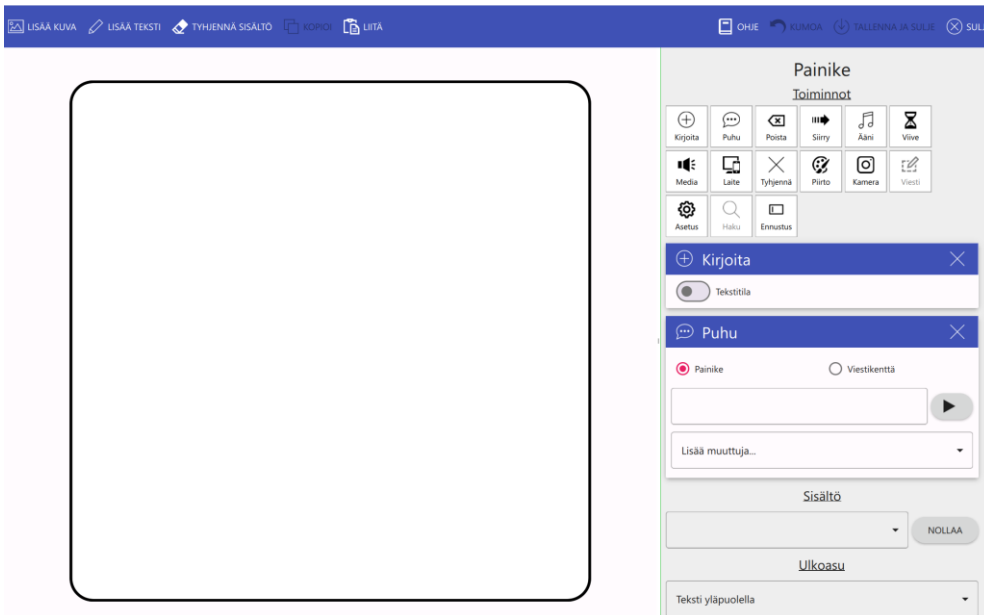


Kuvan lisäys


Kuvan lisäys painikkeeseen onnistuu työkalupalkin 'Lisää kuva' – toiminnolla tai liittämällä kuva leikepöydältä. Jos olet valinnut oletussymbolikirjastoksi jonkin symbolikirjaston niin klikkaus 'Lisää kuva' riittää ja valitsemasi kirjasto avataan. Mikäli kuitenkin haluat avata valintalistan ja lisätä esimerkiksi kuvan tiedostosta niin paina 'Lisää kuva' – toimintoa pitkään.

Painikkeen muokkaustilassa painikkeeseen voit lisätä tiedoston lisäksi kuvan suoraan leikepöydältä (Windows) painamalla CTRL+V tai valitsemalla 'Liitä'.


Valittu symbolikirjasto avautuu näkymään, josta käyttäjä voi tehdä tarkentavia hakuja:

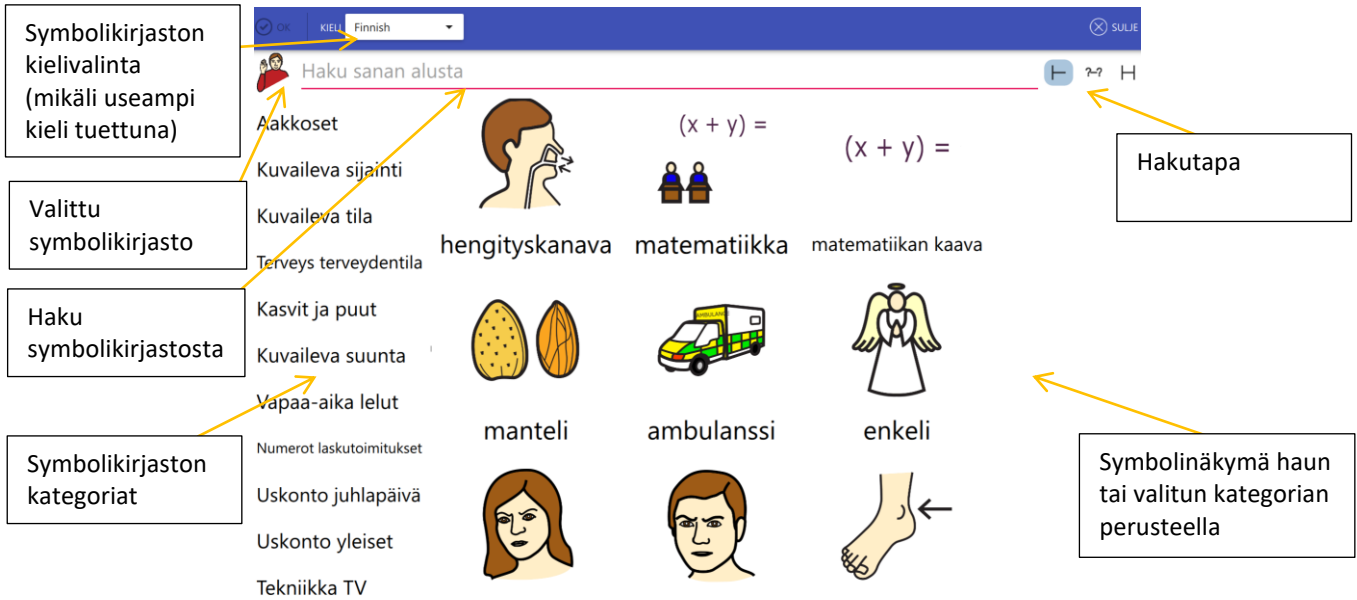

Lisätään kuva 'limonadi':

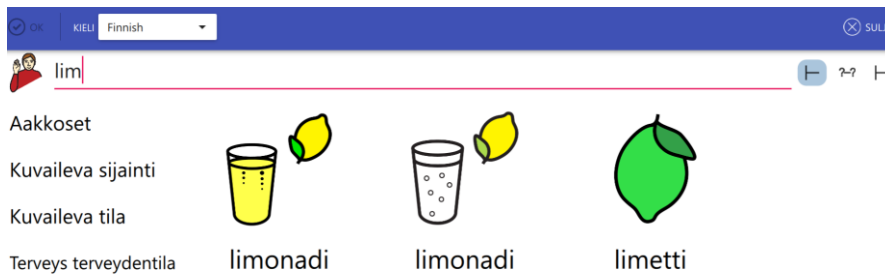

Haluttu kuva valitaan symbolinäkömästä. Kuva ja teksti asettuvat oletusasetusten mukaisesti painikkeeseen:

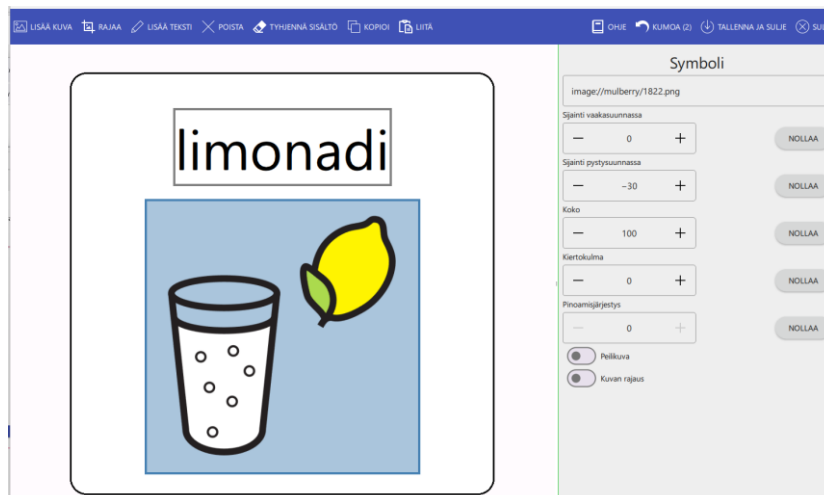

Painikkeen sisältöä voi muokata vapaasti, symboliin tarttumalla sitä voi liikuttaa vapaasti painikkeessa. Symbolin kokoa voi muuttaa kahden sormen zoomauseleellä tai käyttämällä hiiren rullaa (ylös / alas). Symbolia voi myös pyörittää kahden sormen pyöräytyseleellä tai käyttämällä hiiren rullaa CTRL-näppäin painettuna.

Pinoamisjärjestys-ominaisuudella käyttäjä voi määrittää missä järjestyksessä kuvat pinotaan. Pinoamisjärjestys on 0 = taustalla ja mitä suurempi luku sitä edempänä se on näkyvillä.


Huomaa, että kuvat näkyvät työtilassa viimeksi valittu etumaisena (työskentelyä varten), mutta pinoamisjärjestys määrittelee lopullisen sijainnin käyttötilassa.

Kuvaa voi myös rajata ja sen voi asettaa peilikuvaksi.

Kuvan lisäys Internetistä

Windows käyttöjärjestelmä: Kuvan lisäys painikkeeseen käyttäen internetiä onnistuu ensin painamalla 'Lisää teksti' ja kirjoittamalla tekstikenttään haluttu sana. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee työkalupalkista 'Lisää kuva' ja 'Internet', jolloin selain avaa kuvahaun syötetylle tekstille. Valitse haluamasi kuva, klikkaa hiiren oikealla ja valitse 'Kopioi kuva'. Mene takaisin DialoQ Talk -sovellukseen, ja valitse työkalupalkista 'Liitä'.


Android -käyttöjärjestelmä: Kuvan lisäys painikkeeseen käyttäen internetiä onnistuu ensin painamalla 'Lisää teksti' ja kirjoittamalla tekstikenttään haluttu sana. Tämän jälkeen käyttäjä valitsee työkalupalkista 'Lisää kuva' ja 'Internet', jolloin selain avaa kuvahaun syötetylle tekstille. Valitse haluamasi kuva ja lataa se. Mene takaisin DialoQ Talk -sovellukseen, ja valitse työkalupalkista 'Lisää kuva' ja 'Tiedosto'. Valitse kansioista lataamasi kuva.

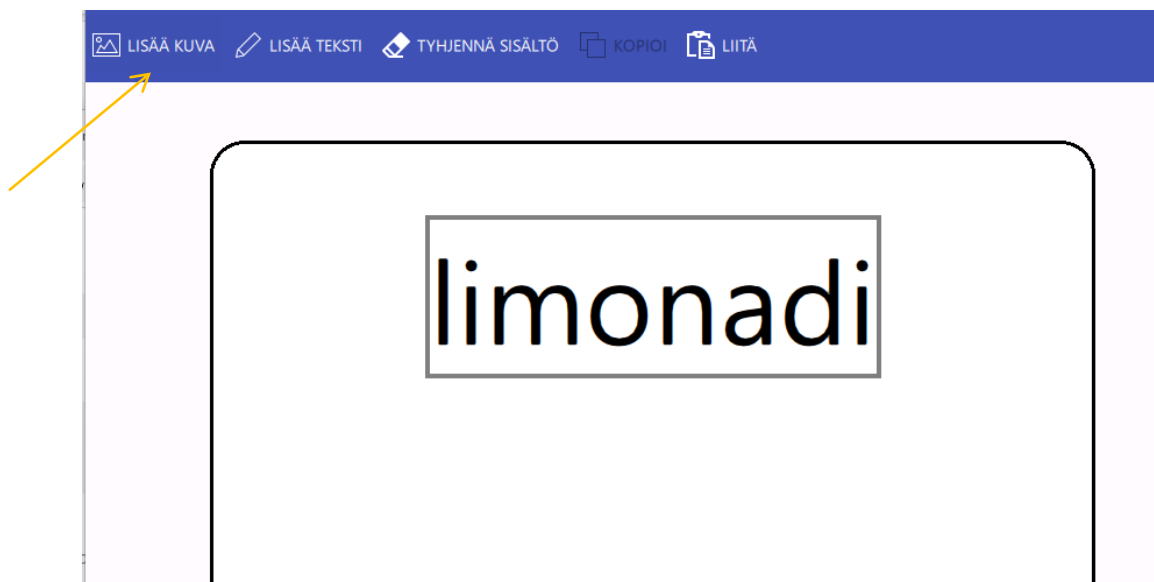

Kuvan sijaintia ja kokoa voi muokata oikealla olevasta valikosta. Tarkemmat käyttöohjeet Windowsin ja Androidin käyttäjille löytyy erillisestä ohjeesta.


Painikkeen toiminnot

Painikkeeseen asetetaan oletuksena perustoiminnot kirjoita ja puhu – toiminnot. Käyttäjä voi lisätä lisää toimintoja tuplaklikkaamalla halutun toiminnon päällä tai vetämällä toiminto toimintolistasta alas asetettuihin toimintoihin.

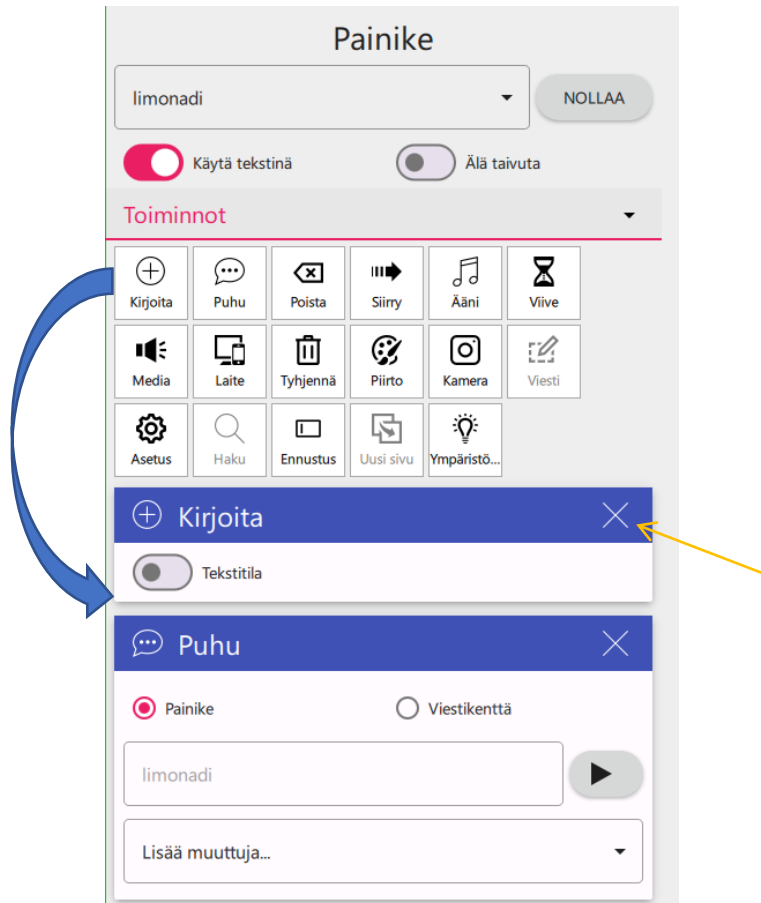


Toiminnon poistaminen toimintolistasta onnistuu toiminnon sulje-painikkeesta.



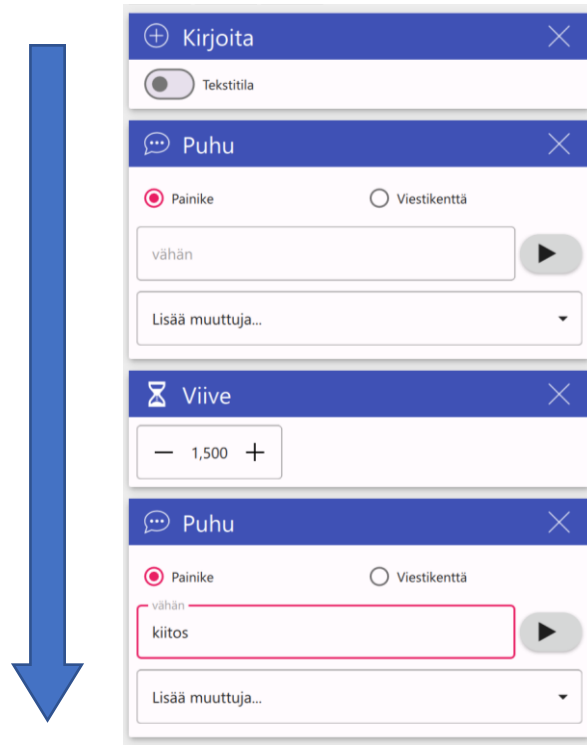

Asetetut toiminnot suoritetaan painiketta painettaessa järjestyksessä eli esimerkiksi seuraavassa painikkeen painallus tekee: kirjoittaa tekstin viestikenttään, puhuu asetetun tekstin ('vähän'), odottaa 1,5 sekuntia ja puhuu 'kiitos'.

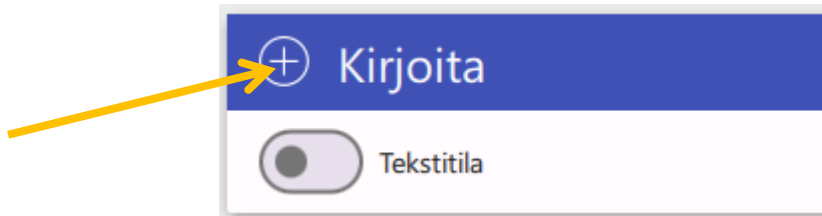














Käyttäjä voi muuttaa toimintojen suoritusjärjestystä vetämällä toimintoja toimintolistassa eri järjestykseen. Uusi toiminto lisätään aina toimintolistaan viimeiseksi. Toimintoa liikutetaan painamalla ja vetämällä toiminnon kuvakkeen kohdalta.



DialoQ Talkin tukemat toiminnot:


Toiminto	Kuvaus
 Kirjoita	Toiminto lisää painikkeen tekstisisällön viestikenttään. Optio 'tekstitila' syöttää painikkeen sisällön viestikenttään kirjaimin.
 Puhu	Puhu-toiminnolla voidaan puhua painikkeen tai viestikentän sisältö. Painikkeen tekstisisällön lisäksi voit asettaa puhu-toiminnon tekstikenttään oman tekstin.
 Poista	Toiminto poistaa viimeisimmän syötteen viestikentästä tai tyhjentää koko viestikentän sisällön.
 Siirry	Taulujen välillä navigointiin, siirtyminen haluttuun tauluun, aloitussivulle, edelliseen tauluun tai satunnaiseen tauluun (valuista tauluista).

 Ääni	Toiminnolla voi soittaa halutun äänitteen tiedostosta tai lisätä omaa puhetta käyttäen mikrofonitoimintoa.
 Viive	Viive-toiminto, viive millisekunneissa eli 1000ms = 1 sekunti.
 Media	Median ohjaustoiminnot, esimerkiksi äänet pois, kovemmalle tai hiljemmalle.
 Laite	Suorittaa käyttäjän laitteeseen liittyviä toimintoja (esim. sulje tietokone tai sulje taulusto).
 Tyhjennä	Tyhjentää kaikki ks. taulussa olevat käyttäjän omat tiedot (esim. kamera- tai viestitoiminnolla lisätyt käyttäjän tiedot). Toimintoa voi myös säätää poistamaan vain kuvat, äänitteet tai viestit.
 Piirto	Piirto-toiminto, avaa tyhjän näytön käyttäjän omia piirustusta varten. Piirros tallentuu painikkeeseen ja sen saa uudelleen valinnalla avoimeksi. Piirrokseen voi myös lisätä siihen liittyviä äänitteitä, jotka soitetaan, kun piirros avataan.
 Kamera	Kamera-toiminto, lisää käyttäjälle mahdollisuuden ottaa kuvia käyttötilassa. Kuva tallentuu tämän toiminnon sisältämään painikkeeseen. Kuvan lisäksi tällä toiminnolla on mahdollista tallentaa kuvaan liittyviä äänitteitä sekä piirtää otetun kuvan päälle.
 Viesti	Viesti-toiminto, lisää käyttäjälle mahdolliseen tallentaa viestikentän sisältö painikkeeseen käyttötilassa. Viesti tallentuu painikkeeseen, josta sen saa avattua isommaksi ja lisättyä viestikenttään tai tarvittaessa poistaa.
 Asetus	Asetus-toiminnolla voidaan säätää tauluston käyttäytymistä käyttötilassa, ilman että käyttäjä poistuu käyttötilasta. Esimerkiksi 'painikkeen sisältö (puhevihje) tai viestikentän valinta ennen puhetta voidaan säätää päälle tai pois päältä käyttötilassa.
 Haku	Haku-toiminnolla voidaan avata symbolihaku suoraan käyttötilassa. Tämä avaa näytölle hakukentän, johon syöttämällä tekstiä ohjelma etsii ks. sisällön sisältämää painiketta. Valitsemalla löydetty symboli, ohjelma näyttää käyttäjälle polun ks. symboliin.
 Ennustus	Ennustus-toiminnolla voit tehdä ennustukseen liittyviä toimintoja painikkeeseen, kuten 'näytä seuraavat tai edelliset ennustukset'.
 Uusi sivu	Uusi sivu-toiminnolla voidaan luoda uusia sivuja suoraan käyttötilassa. Tätä toimintoa käytetään esimerkiksi viikkokalenterin uusien viikkojen luomiseen tai kamera-galleriaan lisäsivujen luontiin.
 Ympäristö...	Ympäristönhallinta-toiminnolla ohjataan kodin laitteita kuten valoja, ovia, ikkunoita tai televisiota. Toimintoon valitaan käyttäjän laitteeseen asetuksissa konfiguroitu ympäristönhallinta laite.

Valmiin painikkeen voi monistaa muokkaustilassa valitsemalla kopioi ja liitä tai käyttämällä näppäinkomentoja CTRL+C ja CTRL+V. Käyttöohjeen lopussa on listattu kaikki tuetut näppäinkomennot.

Näppäimistön luonti

DialoQ Talkissa on näppäimistön luontia varten oma työkalu. Näppäimistö luodaan näpdyttämällä taulua ja valitsemalla 'Luo näppäimistöasettelu':

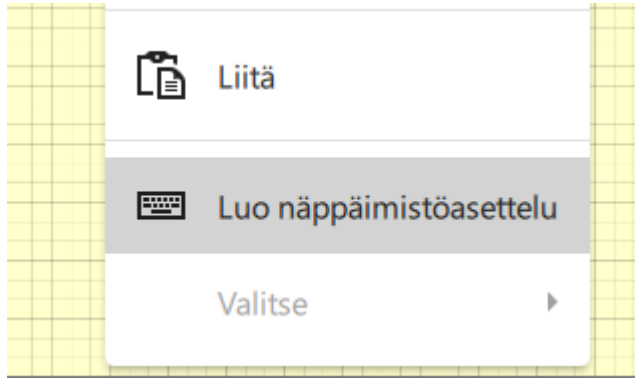

Tämä avaa ikkunan, jossa annetaan näppäimistöasettelu sekä mm. näppäinten etäisyydet pysty- ja vaakalinjassa sekä tehdä suoraan isot/pienet kirjaimet asetteluun:

Luo näppäimistöasettelu

qwertyuiopå
asdfghjklöä
zxcvbnm, .

Isot kirjaimet

Sarakeväli

5

—●—

Riviväli

10

—●—

PERU OK


Näppäimistöasettelu on täysin muokattavissa eli voit luoda näppäimet täysin vapaalla asettelulla.

Mikäli haluat luoda näppäimistön eri värein (tausta-, kehys- ja tekstiväri) niin se tehdään seuraavasti:


- luo ensin painike, joka vastaa haluttua näppäintä esim. tumma taustaväri ja vaalea tekstiväri.



- valitse painike ja paina oikeaa hiirenpainiketta (tai pitkään kosketusnäytöllä) ja valitse Luo näppäimistöasettelu:

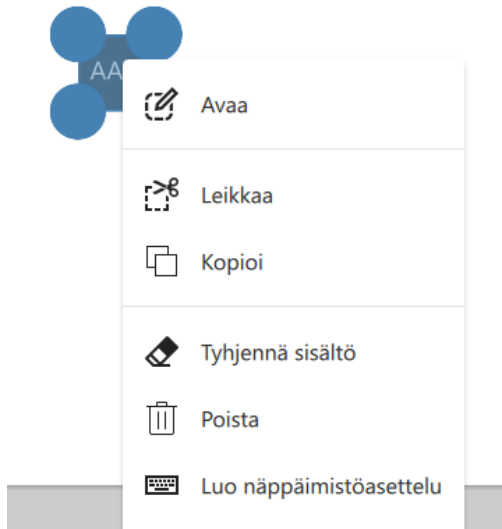


- näppäimistöasettelun voit siirtää haluttuun paikkaan ja esim. muuttaa kokoa taulun pohjaan sopivaksi:

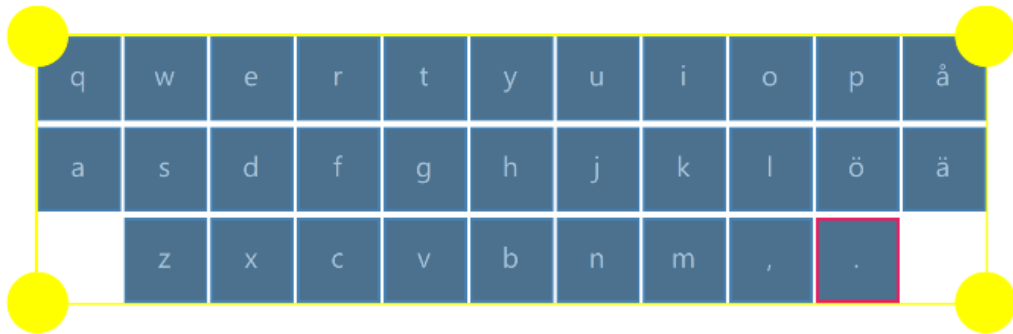

Sana- ja symbolikandidaatit


Sana- ja symbolikandidaatit luodaan näpäyttämällä taulua valitsemalla lisää sanakandidaatti. Tämä objekti näyttää käytössä olevan sanakirjan mukaisesti sanaennusteita, mikäli taulustosta löytyy ks. sanalle symboli näytetään myös symboli.

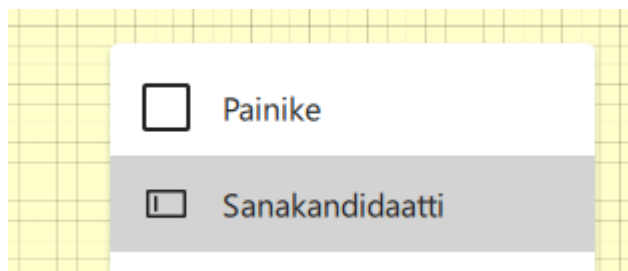

Tee ensin kandidaatista halutun kokoinen sekä säädä mm. värit halutuiksi. Tämän jälkeen valitse kandidaatti ja työkalupalkista valitse 'monista':




Voit asemoida ja säätää monistetut objektit halutun kokoiseksi:

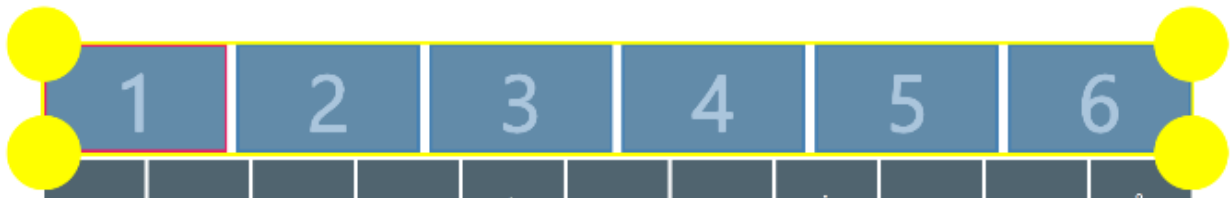

Sanakirjat

Ohjelman asetuksista voit valita käytetyt sanakirjat, joita käytetään ennustuksissa. Jos käytät DialoQ Talkin sisäistä sanakirjaa niin se myös oppii käyttäjän syötteestä niin uusia sanoja kuin käyttäjän käyttämiä sanayhdistelmiä. Oppiminen tapahtuu puhutun lauseen yhteydessä.

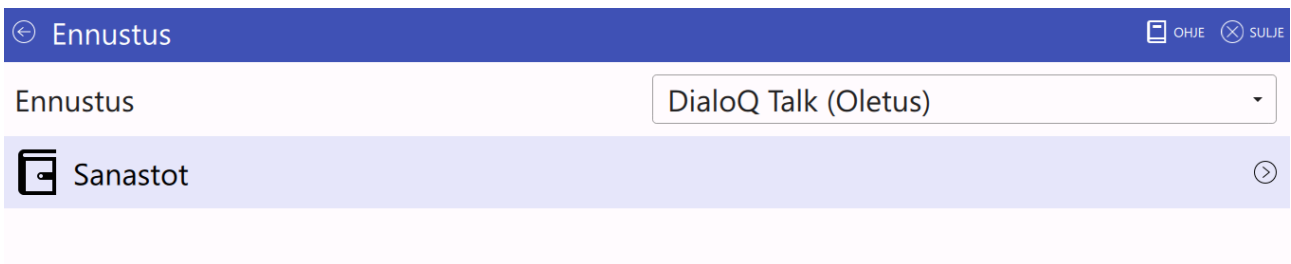

Sanasto voi olla valmis tekstipohjainen sanasto tai täysin tyhjä sanasto. Täysin tyhjää sanastoa voi hyödyntää etenkin symbolikommunikaatiossa, jolloin kandidaatit näyttävät eniten käytettyjä symboleita sekä ennustaa seuraavia symboleita perustuen käyttäjän aikaisempaan syötteeseen.

Sanastot Päivitä suomi OHJE SULJE

Suomen kielen sanasto

Suomen kielen sanasto, joka soveltuu tekstikommunikointiin. Sanasto oppii käyttäjältä ja tallentaa myös käyttäjän omat sanat.

Copyright © 2023 Code-Q Ltd. All rights reserved.

Asennettu versio: 1.0

POISTA

Käyttäjän oma sanasto


Tyhjä sanasto, joka ei sisällä ennalta opittuja sanoja, vaan oppii vain käyttäjän syötteestä.

Asennettu versio: 1.0

POISTA


Esimerkissä valittuna tekstipohjaiseen ennustukseen tehty valmis sanasto, joka täydentyy käytön myötä käyttäjän omilla sanoilla ja sanayhdistelmillä.

Tämän ohjeen mukaisesti luotu näppäimistö esimerkiksi tekstipohjaisella sanastolla näyttäisi käyttötilassa tältä:

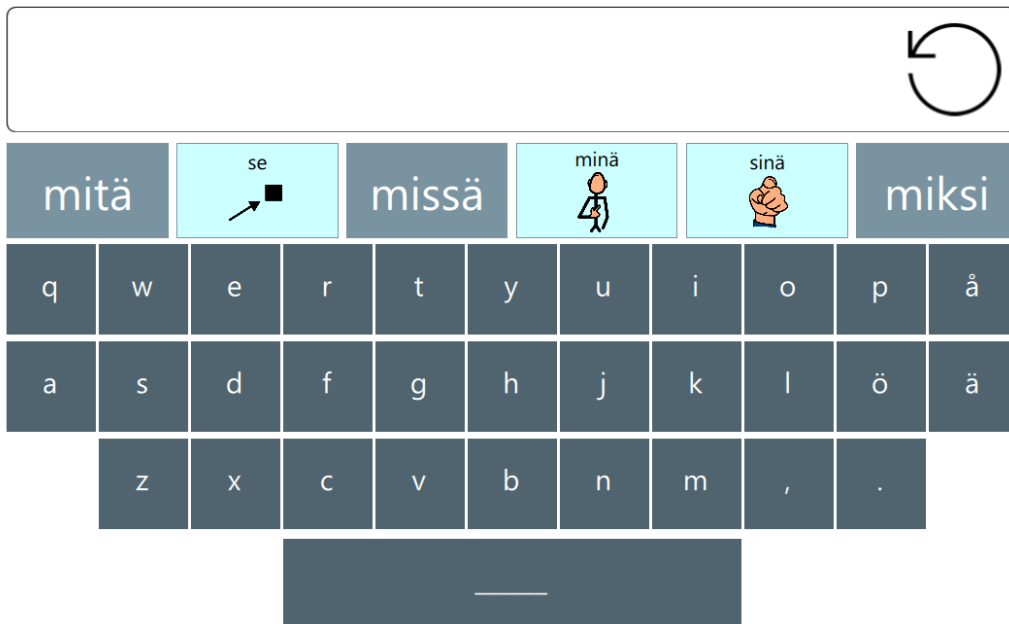

Aloitussivun asetus

Avaa haluttu taulu ja taulun ominaisuuksista aseta päälle aloitussivu – ominaisuus:

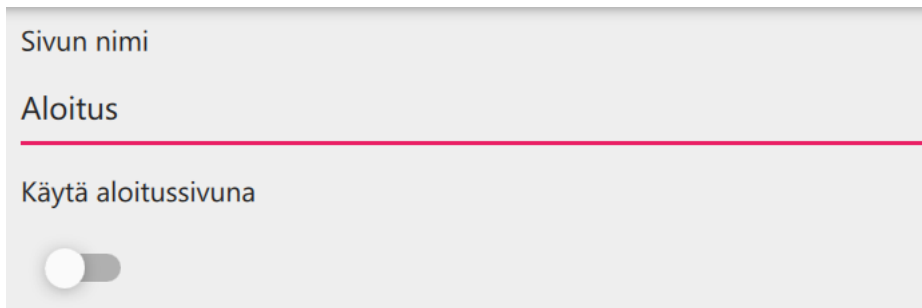


Aloitussivuksi asetettu taulu käynnistyy automaattisesti käyttötilassa ja kaikki 'Koti'-siirtymän sisältämät painikkeet siirtyvät tälle taululle. Jos laite on säädetty käynnistymään suoraan käyttötilaan, niin laite käynnistyy suoraan aloitussivulle.

Taulustossa voi olla vain yksi aloitussivu.


Uuden taulun lisäys

Uuden taulun voi lisätä joko työkalupalkin 'Taulu' - 'Uusi' – toiminnolla tai valitsemalla haluttu taulu ja käyttämällä työkalupalkin 'Muokkaa' - 'Kopioi' ja 'Liitä' – toimintoja.

Kopioi ja liitä – toiminnot ovat käytettävissä myös näppäimistöikopolkujen CTRL+C ja CTRL+V kautta.

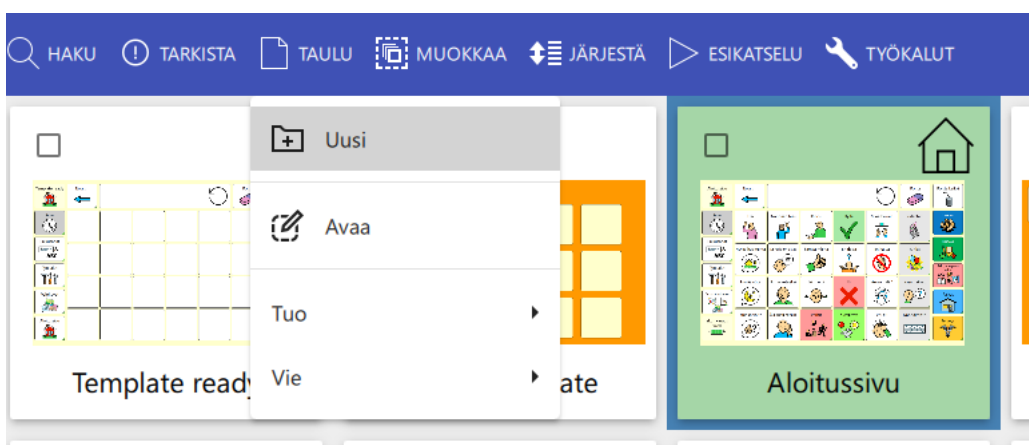


'Uusi' – toiminto avaa valittavaksi mallipohjavalikon, joka sisältää oletuksena useita mallipohjia, joko ruudukkopohjaiseen asetteluun tai vapaaseen sijoitteluun (Tyhjä sivu).

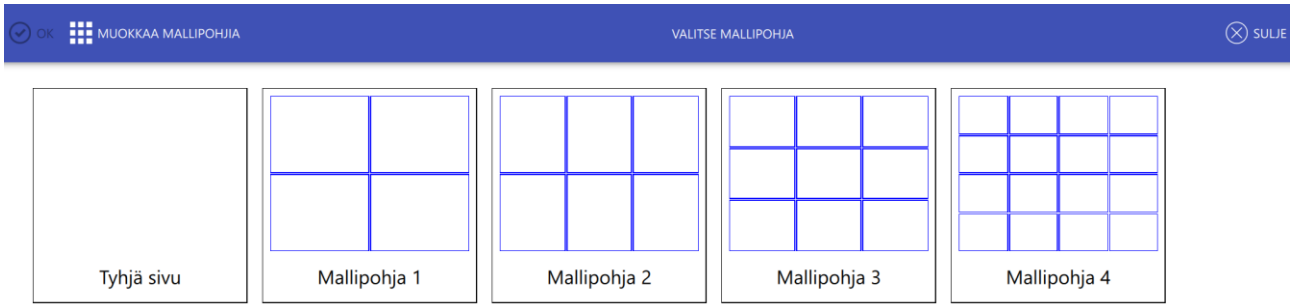

Käyttäjä voi luoda lisää omia mallipohjia käyttäen 'Uusi mallipohja' valintaa tai muokkaamalla nykyisiä pohjia työkalupalkin 'Muokkaa mallipohjia' – toiminnon avulla.


Navigointi taulujen välillä

Taulussa oleviin painikkeisiin voidaan lisätä 'Siirry'-toiminto, jonka avulla voidaan siirtyä toisiin tauluihin.

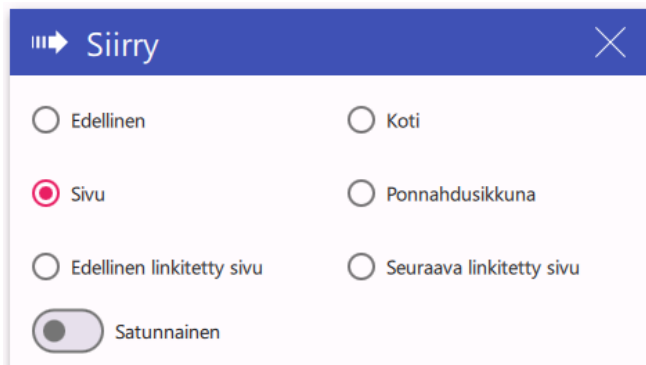

- *Edellinen*, siirtyy takaisin edelliselle sivulle
- *Koti*, siirtyy takaisin tauluston käynnistyssivulle
- *Sivu*, siirtyy halutulle sivulle (kts. lisää alta)
- *Ponnahdusikkuna*, avaa halutun ponnahdusikkunan
- *Edellinen linkitetty sivu*, avaa edellisen uusi sivu – toiminnolla luodun sivun
- *Seuraava linkitetty sivu*, avaa seuraavan uusi sivu – toiminnolla luodun sivun
- *Satunnainen*, avaa satunnaisen taulun valittujen taulujen listasta

Kun valitset siirtymää haluttuun tauluun, valitse haluttu taulu avautuvasta listasta. Jos taulu sijaitsee listan loppupäässä niin näppäimistön END ja HOME painikkeilla tai etsi oikea taulu kirjoittamalla taulun nimen kenttään (tämä vain Windowsissa):

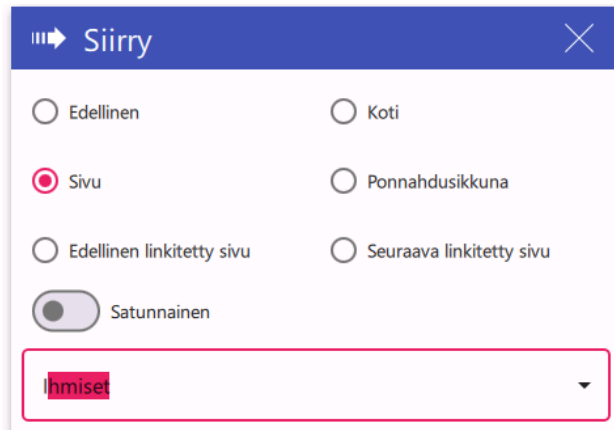

Mikäli haluat käyttää satunnaista siirtymistä useamman taulun välillä – valitse 'Satunnainen' ja valitse halutut sivut siirtymislistaan, josta satunnainen siirtyminen valitaan.

Käytä aina Koti-valintaa, kun haluat siirtyä aloitussivulle! Näin voit vapaasti vaihtaa aloitussivua ilman suurempia muutoksia koko taulustoon!

Tauluston taulujen nimiä voidaan muuttaa myöhemmin eikä nimen muuttaminen vaikuta taulujen väliseen siirtymään. Taulun nimeä käytetään vain tauluston muokkaajan ja käyttäjän apuna, löytämään haluttu taulu, ei ohjelmiston sisäiseen toimintaan.


Yksittäisten taulujen siirto taulustoon

Käyttäjän taulustoon voi lisätä tauluja usealla eri tavalla, esimerkiksi leikepöydän tai tiedostojen kautta.

Huomaa, että jos teet uutta materiaalia, jota haluat käyttää useammassa eri taulustossa niin tee se aina tyhjään tai muuten lisenssivapaaseen taulustoon, koska tekemällä muutokset esim. Roihu Päiväkoti – taulustoon vaatii, että toisellakin käyttäjällä on Roihu Päiväkoti lisenssi.

Voit tuoda omia sivuja taulustoon esimerkiksi seuraavasti:

1. Tee uudet taulut ja tallenna ne tiedostoon esim. 'omat.talk'
2. Avaa taulusto, johon haluat tuoda nämä taulut esim. 'Roihu Päiväkoti'
3. Mene muokkaustilaan ja valitse ylävalikosta 'Taulu' – 'Tuo'

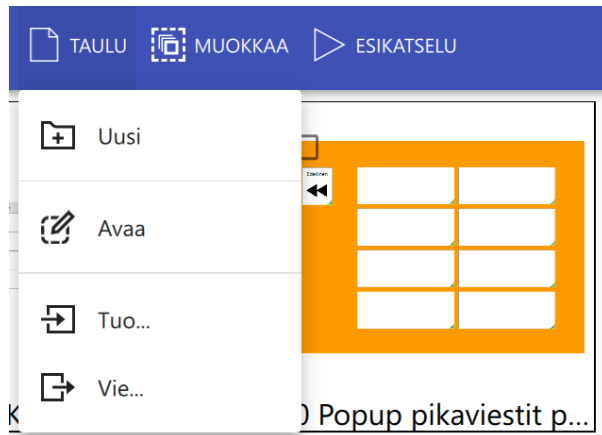

4. Uudet taulut tulee tauluston taulunäkymän loppuun.
5. Mikäli haluat siirtää osan tauluista toiseen taulustoon, valitse taulut taulunäkymässä (vasen yläkulma):



6. Työkaluriviltä valitse 'Taulu' – 'Vie' – tämä tallentaa nämä taulut tiedostoon. Jos viet taulustoja kopiosuojatusta materiaalista, niin nämä taulut avautuvat vain niissä laitteissa, joissa on vastaavan tauluston lisenssi aktivoituna (esimerkiksi Roihu päiväkot).

Käyttötila

Käyttötilassa suoritetaan työtilaan ladattua taulustoa. Käyttötila käynnistyy asetetulle aloitussivulle.



Mikäli DialoQ Talk on asetettu käynnistymään suoraan laitteen käynnistyksen yhteydessä ja ohjelman asetuksista on valittu asetus 'Aktivoi käynnistyksen yhteydessä', niin tauluston aloitussivu näytetään automaattisesti eikä käyttäjälle näy DialoQ Talkin päävalikkoa.

Käyttötila käynnistyy oletuksena kokoruudulle, Windows-laitteissa käyttötilan voi asettaa myös ikkunamoodiin, jolloin taulustojen muokkaaminen voi isolla näytöllä olla helpompaa.

Käyttäjän oma sisältö – painikkeet


Kamera-, viesti- ja piirtotoiminnot toimivat käyttötilassa helppona tapana lisätä käyttäjän omaa materiaalia taulustoon, ilman että käyttäjän tai sidosryhmän tarvitsee poistua käyttötilasta muokkaustilaan.

Käyttäjän oma sisältö – painikkeet näkyvät käyttötilassa seuraavasti:




Kamera- ja mikrofoni-toiminto

Kamera-toiminnon sisältävä painike käynnistää automaattisesti kameran, kameran avulla käyttäjä voi ottaa painikkeeseen kuvan:

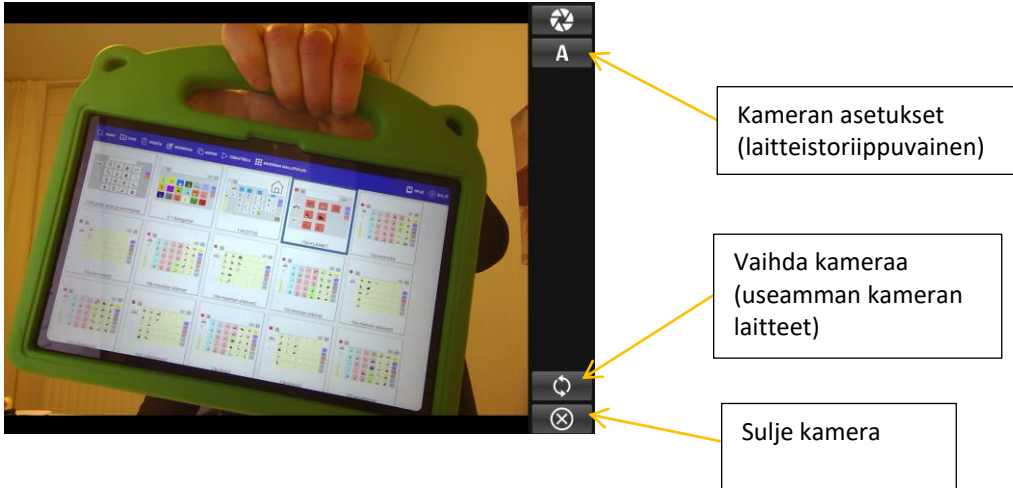


Käyttäjän ottama kuva avautuu isompana näyttöön:

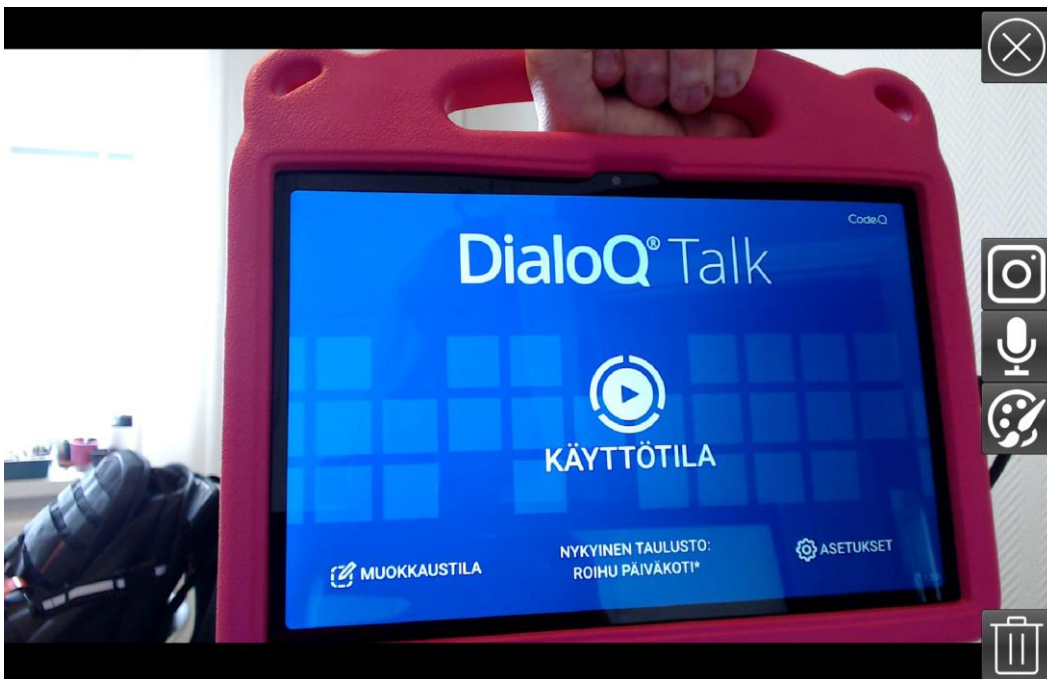


Kamera-painikkeesta voi ottaa tarvittaessa uuden kuvan.

Mikrofoni-toiminnolla voi kuvaan lisätä äänitteitä, painamalla kerran mikrofonista äänitys käynnistyy ja toinen painallus lopettaa äänityksen. Tallennetut äänitteet näkyvät kuvan oikealla puolella.

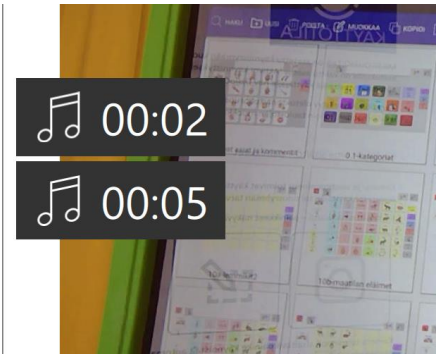

Äänitteen voi kuunnella näpäyttämällä sitä, mikäli äänite ei vastaa toiveita sen voi poistaa tarttumalla äänitteeseen ja vetämällä vasemmalle, kunnes äänite poistetaan:

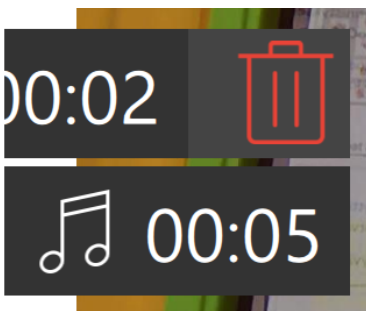

Piirtopainikkeella avataan piirtotoiminnot, joiden avulla käyttäjä voi piirtää kuvan päälle. Kuvan päälle voi myös lisätä symboleita tai tarroja laitteelle ladatuista symbolikirjastoista.


Käyttäjän lisäämä materiaali näkyy kamerapainikkeessa seuraavasti:



Kun kuvan sisältämää painiketta painetaan, avautuu kuva isompana ja äänitteet soitetaan automaattisesti. Kuvanäytössä olevasta roskakoripainikkeesta voi painikkeen tiedot tyhjentää, mikäli niille ei ole tarvetta.

Huomaa, että ohjelman pääasetuksista voit asettaa kameras ottamien kuvien tallentamisen automaattisesti laitteen galleriaan, näin kuvat löytyvät galleriasta, vaikka ne painikkeesta poistettaisiinkin. Asetuksista voi myös poistaa kuvien ja äänitteiden poistotoiminnot, jolloin käyttäjä ei voi poistaa otettua kuvaa vahingossa.

Kamera-toiminnolla otetut kuvat voidaan poistaa 'Tyhjennä'-toiminnolla (käyttötila) tai muokkaustilassa kamera-toiminnon ominaisuuksista 'Nollaa'.

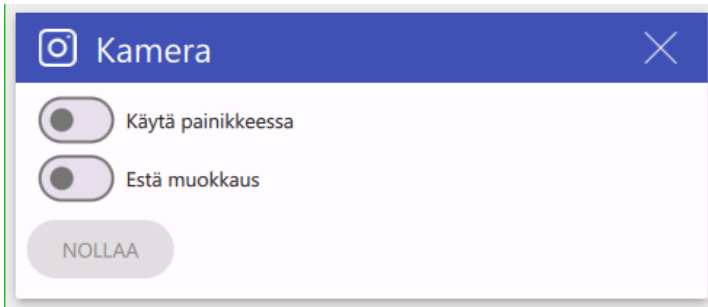


Kamera-toimintoa voi myös hyödyntää siten, että lisätään kameralla otettu kuva automaattisesti painikkeen kuvaksi. Tämä toiminto aktivoidaan 'Käytä painikkeessa' – asetuksella. Tällä asetuksella 1. käyttökerralla käynnistetään kamera, kun kuva on hyväksytty, niin se tallennetaan painikkeen kuvaksi. Seuraavilla käyttökerroilla painike toimii kuten normaali painike (eikä kuva avaudu isoksi). Tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi perheenjäsenten tai lähipiirin valokuvien ottamiseen.

Viestitoiminto

Viesti-toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa viestikentän sisällön painikkeeseen. Viesti-toiminto toimii seuraavasti:

- Käyttäjä luo halutun viestin viestikenttään esimerkiksi:

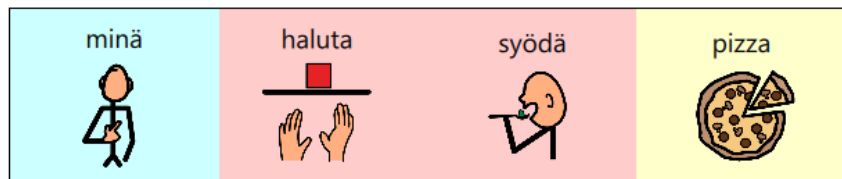


- Jos viestikentän sisältö on sellainen, että tämä viesti halutaan tallentaa, painetaan tyhjää viestitoiminto painiketta:



- Viestikentän sisältö tallennetaan viestitoiminnon sisältämän painikkeen sisällöksi:



- Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa tämän viestin sisältämän painikkeen, tallennettu viesti näkyy näytöllä:

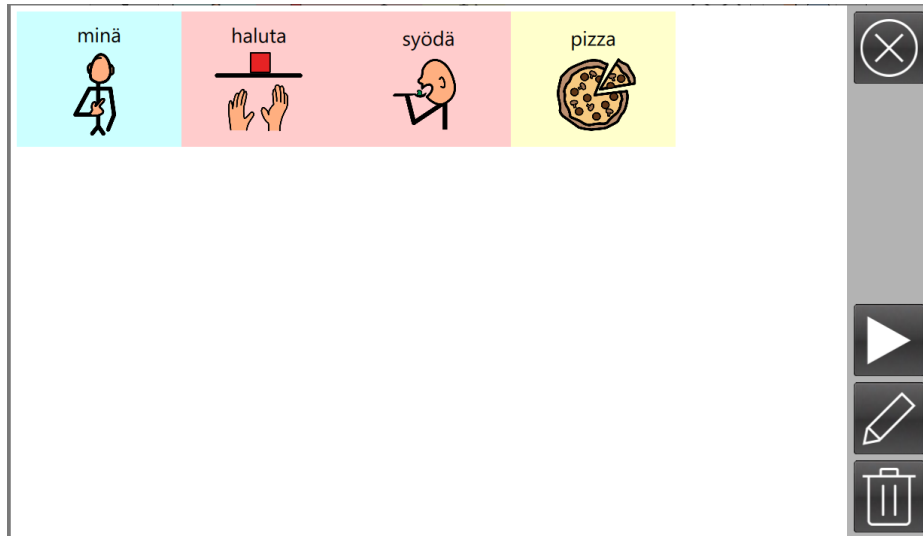

- Soitto-painikkeesta tallennetun viestin voi puhua (ilman että viestikenttä muuttuu)
- Viestiä tai kynää näpäyttämällä viesti lisätään viestikenttään, roskakorikuvakkeesta painikkeen sisältö tyhjennetään. Ponnahdusikkunan sulkemalla viestiä ei lisätä viestikenttään.


Piirtotoiminto

Piirtotoiminnolla käyttäjä voi piirtää omia piirroksia ilman käyttötilasta poistumista. Piirtotoimintoja voi käyttää myös valokuvatoiminnolla otettujen kuvien kanssa.

Piirtotoiminto avaa joko aikaisemmin piirroksen tai tyhjän pohjan. Piirtotyökalut saa aktivoitua oikeasta reunasta.



Työkalut valitaan alapalkista. Esimerkiksi jos käyttäjä haluaa käyttää vapaata piirtoa, valitaan ensimmäinen

työkalu (pensseli ). Valinta avaa penssityökalun sekä lisäominaisuudet tälle (pensselin väri sekä paksuus)




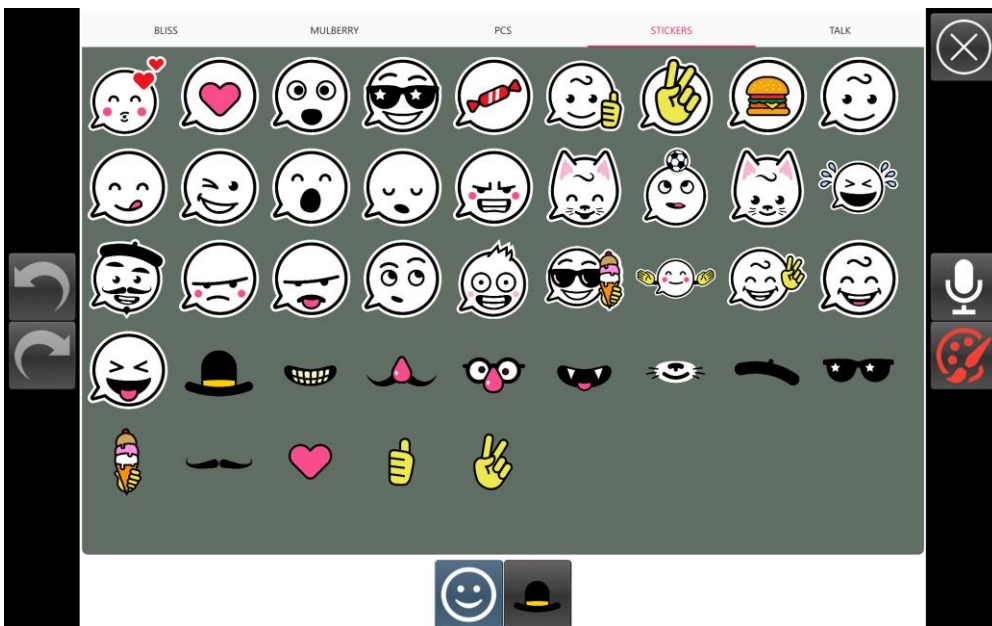
Jos käyttäjä haluaa, vaikka piirtää punaisella värillä, painetaan väripainiketta (vihreä), joka avaa värivalinnan:




Värivalinnan alaosassa on osaksi läpinäkyvää väriä ja yläosassa enemmän peittävää väriä.

Piirtotoiminnon vasemmassa laidassa on 'peru' ja 'tee uudelleen', näillä käyttäjä voi hallita tekemiään muutoksia.

Piirtotyökalujen oikeassa reunassa oleva hymynaama  avaa tarrojen lisäystoiminnon, käyttäjä voi asettaa ladatuista symbolikirjastoista kuviin omia lisäyksiä. Tarran lisäys toimii siten että valitaan ensin haluttu symbolikirjasto ja sieltä kuva:



Tämän jälkeen etsitään keskikohta mihin kuva halutaan asettaa, nyt sormella tai hiirellä vetämällä tarran kokoa ja pyörittyskulmaa voi säätää:

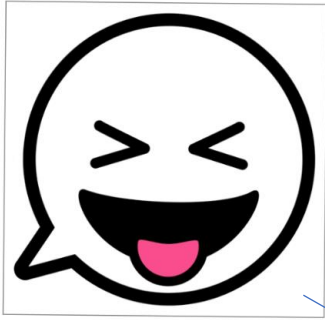


Piirros tallentuu automaattisesti painikkeeseen samalla tapaa kuin esimerkiksi valokuvat. Piirroksiin on mahdollista lisätä myös äänitteitä, jotka soitetaan automaattisesti, kun piirros avataan käyttötilassa.

Dynaamiset kentät painikkeissa


Painikkeeseen voi lisätä staattisen tekstin lisäksi esimerkiksi kellonajan, päivämäärän tai vaikkapa akun varaustilanteesta kertovan tekstin.

Esimerkiksi kellonajan lisäys painikkeeseen:


- Luo uusi painike ja lisää siihen tekstikenttä, valitse 'Lisää muuttuja...' ja 'Aika'.

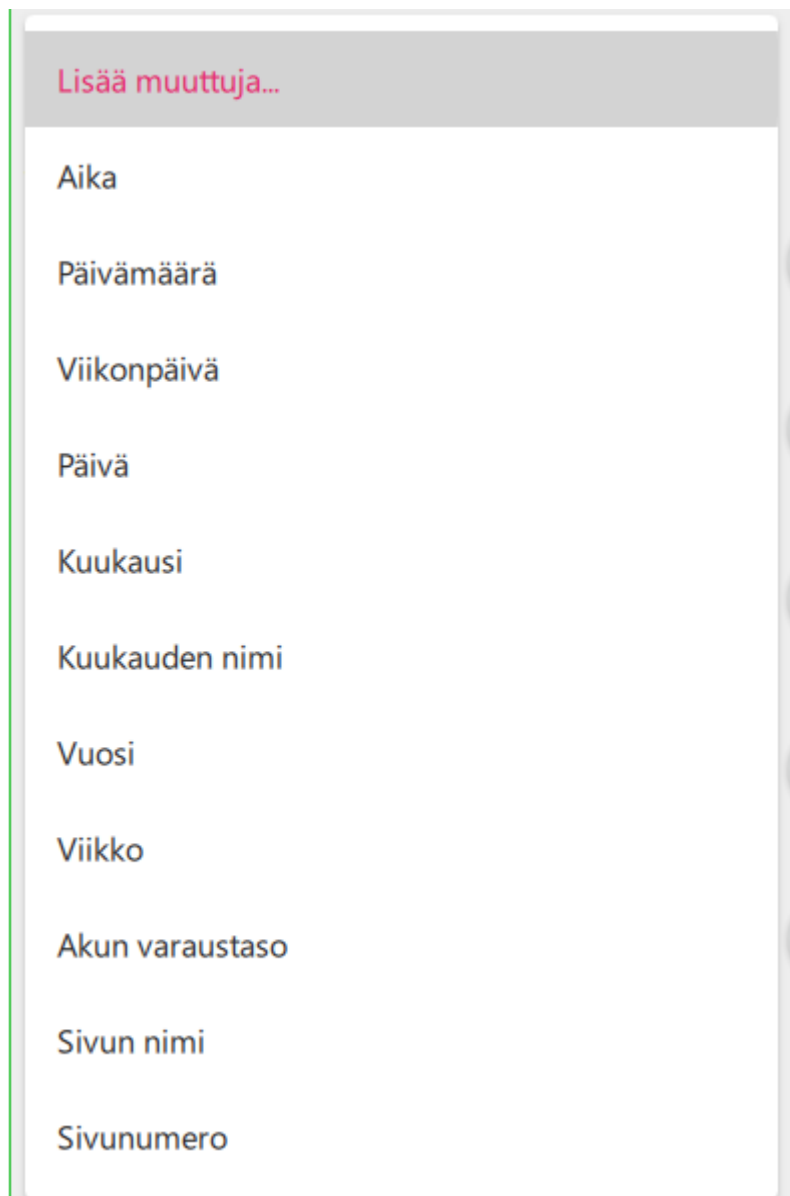

- Voit muuttaa tekstin kokoa ja ulkoasua normaalisti
- Tallenna muutos
- Aika-kenttä näkyy taulustossa seuraavasti:

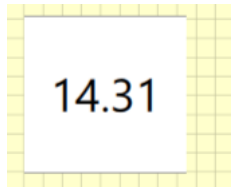

- Voit lisätä dynaamista tietoa myös puhekenttään.
- Huomaa, että voit lisätä tekstiä muuttujan lisäksi esimerkiksi, jos käyttäjä painaa ks. tekstikenttää niin puhe-toiminto voi sisältää 'kello on {TIME}':

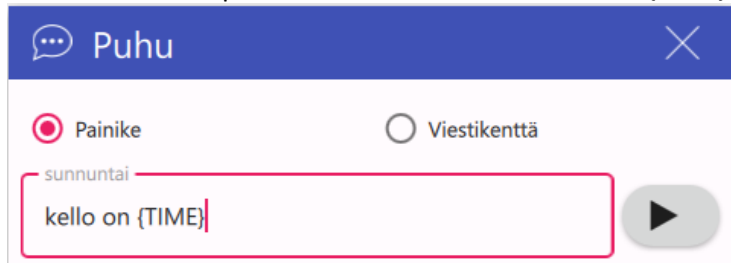


Objektien piilottaminen käyttötilassa

Mikäli käyttäjä ei hallitse vielä kaikkia toimintoja tai halutaan piilottaa käyttötilassa tietoa mitkä myöhemmin ehkä otetaan käyttöön, onnistuu se objektin piilotustoiminnolla.

Esimerkiksi piilotetaan 'Sammuta tietokone' – painike.

- Etsitään painikkeen sijainti hakutoiminnolla

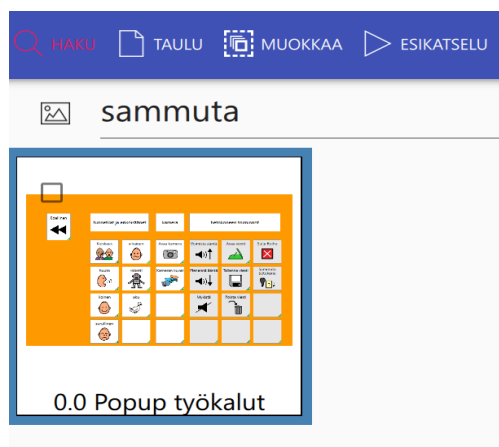

- Avaa taulu ja painike.
- Valitse oikealta ominaisuuskentästä 'Piilotettu', painikkeen ylle tulee piilotusta kuvaava symboli.

Ulkoasu

Teksti yläpuolella

Fontti

Oletus NOLLAA

Fonttikoko

30 (Oletus) NOLLAA

Läpinäkyvyys

0 Piilotettu

- Painike ei nyt näy lainkaan käyttötilassa, mutta se saadaan käyttöön poistamalla 'Piilotettu' – valinta.




Tulostus


DialoQ Talkin tulostusominaisuus on saatavilla uusiin DialoQ Talk Windows lisensseihin. Mikäli käyttäjä haluaa tulostaa taulun tai useita tauluja, onnistuu se tulostustoiminnolla. Löydät 'Tulosta' painikkeen muokkaustilan yläpalkista.

Esimerkiksi käyttäjä haluaa tulostaa aloitussivun sekä valitsemansa muut taulut.

- Valitaan halutut tulostettavat taulut klikkaamalla valintaruutu päälle taulusta, tai Ctrl + klikkaus. Jos haluat valita kaikki tauluston taulut, paina yläpalkista 'Muokkaa' ja 'Valitse kaikki'.

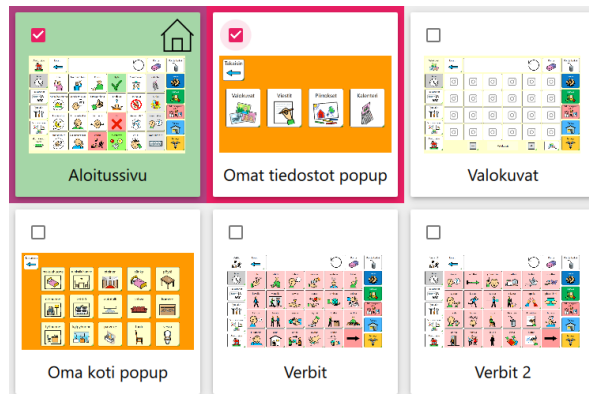


- Valitaan 'Tulosta' yläpalkista. Tulostuksen lisäksi voit käyttää PDF-painiketta, jolla taulut voi tallentaa PDF-formaattiin.

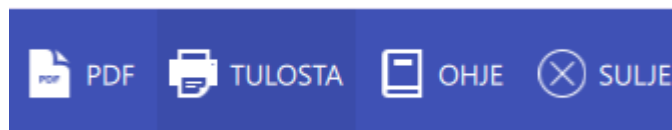

- Näytölle avautuu tulostuksen esikatseluruutu. Yläpalkista löydät eri toimintoja, mm. esikatselun zoomauksen määrä, sivun asettelu joko vaaka- tai pystysuuntaan ja sivuasetukset. Tässä esimerkissä käyttäjä haluaa tulostaa vaakasuuntaisesti taulut.



- Sivuasetuksista käyttäjä voi muokata taulun kokoa, esim. A4. Täältä voit muokata myös sivun suuntaa sekä reunuksien kokoa.

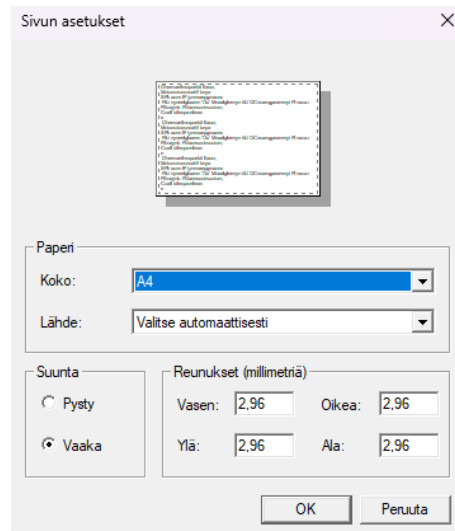


- Kun olet valmis tulostamaan taulut, paina 'OK' ja yläpalkista Tulosta -näppäintä.

Viivain


Muokkaustilan yläpalkista voit laittaa viivaintoiminnon päälle. Tämä lisää taulun ylhäälle ja vasemmalle viivaimen.



Pituuden yksikköä voi muuttaa viivaimen vasemmasta yläkulmasta painamalla käytössä olevaa pituuden yksikkölyhennettä.

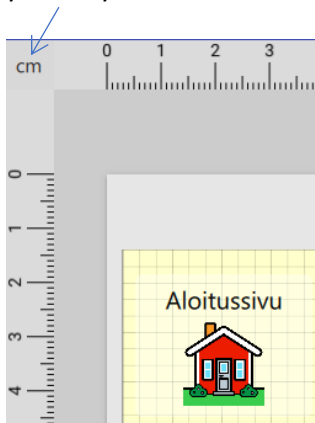

Viivaimella voit myös tarkistaa, miten valitut vierekkäiset objektit/painikkeet näkyvät ja kuinka paljon ne vievät paperilta tilaa. Valitse haluamasi painike/painikkeet aktiivisiksi, ja viivain näyttää valittujen painikkeiden koon mitta-asteikolla.

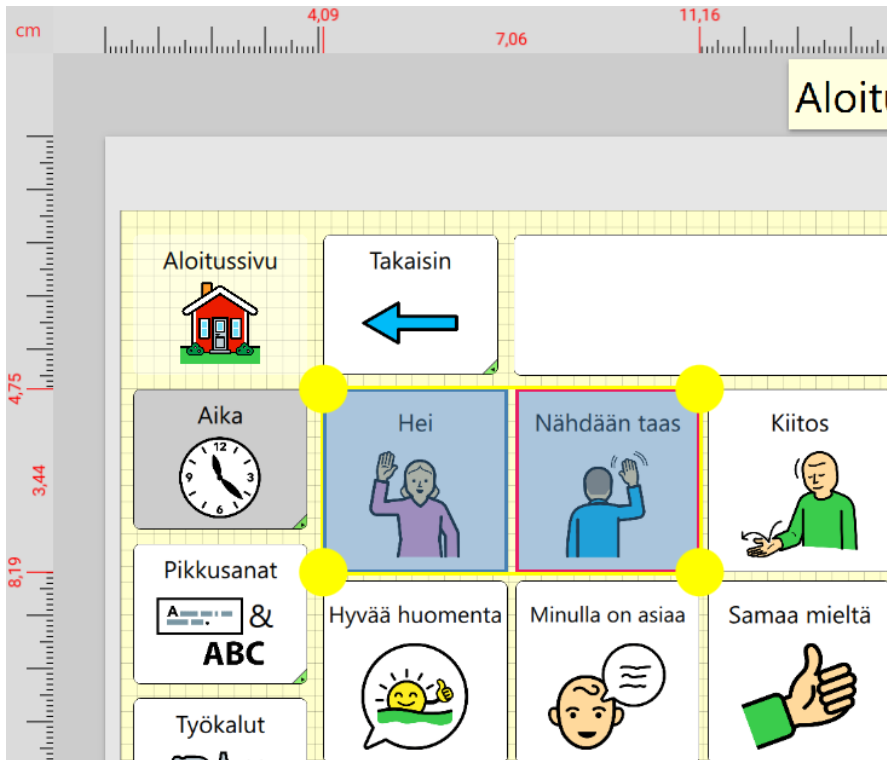

Uuden tulostettavan materiaalin luonti

Avaa muokkaustila, valitse Taulu – Uusi ja tyhjä sivu. Mikäli haluat tehdä materiaalia esim. A4 kokoon, valitse taulun kooksi A4:

TAULU	SYMBOLIT	KUVAT
1710 x 1200 (A4)		
1200 x 1710 (A4)		▼
1200 x 847 (A5)		
847 x 1200 (A5)		NOLLAA
2047 x 1234 (Legal)		SOVITA
1234 x 2047 (Legal)		
2560 x 1080 (21:9)		NOLLAA
1920 x 1080 (16:9)		
1920 x 1200 (16:10)		NOLLAA

Näppäimistöyhdistelmät

DialoQ Talk tukee eri näppäinyhdistelmiä, joilla käyttöä näppäimistön kanssa voi sujuvoittaa. Tällä hetkellä tuetut näppäinyhdistelmät:

Taulun muokkaustila:

Näppäinyhdistelmä	Toiminto
CTRL + W	sulje
CTRL + S	tallenna ja sulje
CTRL + Z	kumoa
CTRL + X	leikkaa
CTRL + C	kopioi leikepöydälle
CTRL + V	liitä leikepöydältä
CTRL + ALT + V	liitä toiminnot (kopioidusta painikkeesta)
CTRL + D	monista
CTRL + 0 (nolla)	nollaa taulun zoomaus
DEL	poista valittu
ALT + V	valitse
ALT + S	vaihda paikkaa

Painikkeen muokkaus:

Näppäinyhdistelmä	Toiminto
CTRL + W	sulje
CTRL + S	tallenna ja sulje
CTRL + Z	kumoa
CTRL + C	kopioi leikepöydälle
CTRL + V	liitä leikepöydältä

Lisäksi Ctrl+W (sulje) toimii myös muissa näkymissä, esim. asetukset, taulustot sekä ladattava sisältö.

Yhteystiedot

Lisätietoja DialoQ Talkista ja sen ominaisuuksista löytyy www.dialoq.fi.

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä ohjelmiston jälleenmyyjään tai suoraan meihin ohjelmiston kehittäjiin: dialoq@code-q.fi